

Käyttöohje

# CANDY5 HD



# Sisältö

1. Mikä CANDY5 HD on?.....	4
2. Turvallisuusvarotoimet .....	5
3. Pakkauksen sisältö .....	6
4. Fyysinen kuvaus .....	7
5. Käyttöönotto .....	9
5-1. Akun lataus .....	9
5-2. Näytön suojakalvon poistaminen .....	10
5-3. Kahvan käyttäminen.....	10
5-4. Jalan käyttäminen .....	11
5-5. Lukutelineen käyttäminen.....	12
5-6. Rannehinnan asentaminen.....	13
6. CANDY5 HD:n käyttäminen .....	14
6-1. Virta päälle/pois .....	14
6-2. Lähennä/loitonna .....	16
6-3. Väritilojen muuttaminen.....	17
6-4. Tarkentaminen.....	18
6-4-1. Tarkennuksen säätäminen .....	18
6-4-2. Tarkennustilan vaihtaminen .....	19
6-5. Kuvan pysäytys/tallennus .....	21
6-5-1. Kuvan pysäytys .....	21
6-5-2. Kuvan tallennus .....	22

6-5-3. Tallennettujen kuvien katselu .....	23
6-6. Peilikuva .....	24
6-7. Väritilojen käyttäminen .....	25
6-7-1. Väritilojen asettaminen.....	26
6-7-2. Värin muuttaminen.....	27
6-7-3. Väritilojen poistaminen käytöstä .....	28
6-7-4. Väritilojen ottaminen uudelleen käyttöön .....	30
6-8. Kello .....	31
6-8-1. Ajan tarkistus.....	31
6-8-2. Ajan asetus .....	31
6-9. Muut toiminnot .....	33
6-9-1. Nestekidenäytön kirkkauden säätö....	33
6-9-2. LED-valojen tila .....	34
6-9-3. Virransäästötila.....	35
6-9-4. Äänimerkkien ottaminen päälle / pois päältä.....	37
6-9-5. Tehdasasetusten palautus .....	38
7. Vianmääritys.....	39
8. Takuu .....	43

# 1. Mikä CANDY5 HD on?

CANDY5 HD on elektroninen, kannettava suurennuslaite, joka auttaa heikkonäköisiä lukemaan painettua tekstiä, kuten postia, aikakaus- ja sanomalehtiä, ruokalistoja, tuotekuvastoja, lääkepulloja sekä elintarvikepakkauksia.

Suurentamisen lisäksi CANDY5 HD pystyy muuttamaan tekstin ja taustan väriä niin, että kuvan kontrasti paranee ja lukeminen helpottuu. Valittavana on viisi väritilaa.

Portaaton digitaalinen zoomin suurennustoiminto mahdollistaa suurennustason muuttamisen välillä 1,0–22x. Automaattisen tarkennustoiminnon avulla voit pitää kuvan terävänä samalla, kun liikutat kameraa eteenpäin tekstirivillä.

CANDY5 HD:n ergonominen kolmiasentoinen kahva on suunniteltu mukavaksi käyttää niin oikea- kuin vasenkätisillekin käyttäjille. Pidä kahvaa keskiasennossa tai 45 asteen kulmassa.

## 2. Turvallisuusvarotoimet

Suojele itseäsi ja CANDY5 HD:tä noudattamalla seuraavia varotoimenpiteitä.


- Älä kytke vaihtovirtasovittinta vialliseen sähköpistorasiaan. Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä koske vaihtovirtasovittinta märillä käsillä.
- Käytä vain CANDY5 HD:n mukana toimitettua vaihtovirtasovittinta. Toisen vaihtovirtasovittimen käyttö voi vaurioittaa laitetta.
- Älä käytä CANDY5 HD:tä kosteassa ympäristössä, kuten kylpyhuoneessa tai suihkussa. Näin estät kosteutta joutumasta laitteeseen ja vaurioittamasta sitä.
- Älä paina näyttöä äläkä laita painavia esineitä CANDY5 HD:n päälle. Muutoin CANDY5 HD ja erityisesti sen nestekidenäyttö voivat vaurioitua.

- Älä yritä purkaa tai korjata CANDY5 HD:tä itse. Laitte saattaa vaurioitua vakavasti ja takuu raukeaa.
- Akku on kulutusosa, ja sen käyttöikä voi lyhentyä kuuden kuukauden käytön jälkeen.
- Älä käytä CANDY5 HD:tä suorassa auringonvalossa äläkä hyvin kuumissa tai kylmissä olosuhteissa, sillä kuva ei välttämättä näy oikein nestekidenäytössä. Älä käytä laitetta alle 0 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötiloissa.



### **3. Pakkauksen sisältö**

- (1) CANDY5 HD
- (2) Vaihtovirtasovitin
- (3) Kantolaukku
- (4) Lukuteline
- (5) Rannehihna
- (6) Näytön puhdistusliina
- (7) Käyttöohje

## 4. Fyysinen kuvaus

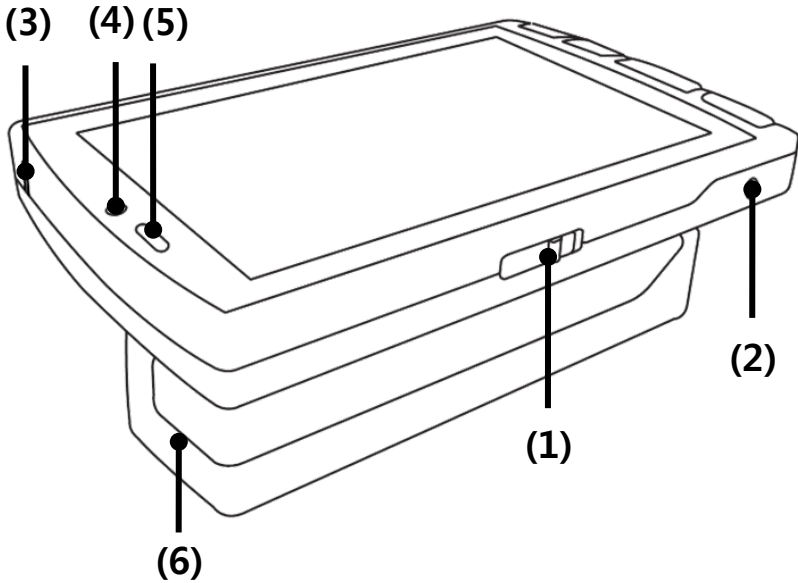

- (1) Virtakytkin
- (2) Tasavirtaliitin (kytke vaihtovirtasovittimeen)
- (3) Akun latautumisen merkkivalo
- (4) Peilikuvakamera
- (5) Kameranvalintapainike
- (6) Kahva

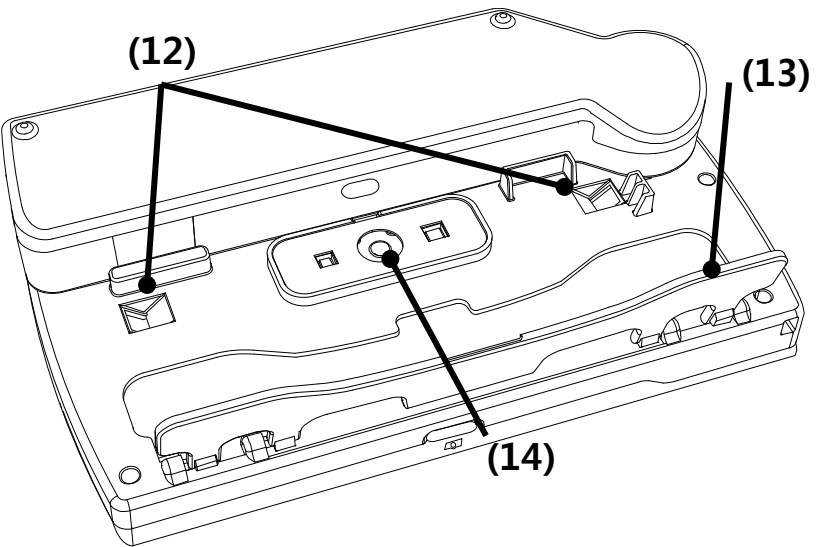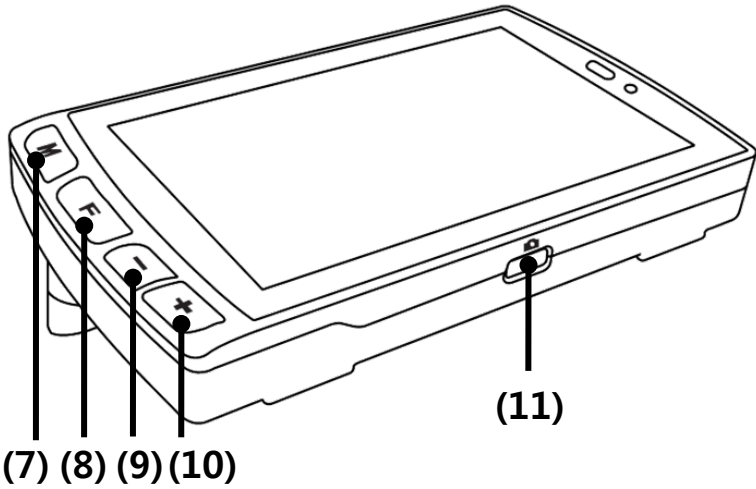

(7) Väritilapainike

(11) Kuvanpysäytyspainike

(8) Tarkennuspainike

(12) LED-valot

(9) Loitonnuspainike

(13) Jalka

(10) Lähennyspainike

(14) Pääkamera




## 5. Käyttöönotto

### 5-1. Akun lataus

Lataa akku täyteen ennen CANDY5 HD:n ensimmäistä käyttökertaa tai jos laitteen edellisestä käyttökerrasta on kauan.

- Kytke tuotteen mukana toimitettu vaihtovirtasovitin tasavirtaliittimeen alla olevan kuvan osoittamalla tavalla.
- Akku latautuu täyteen **kolmessa tunnissa**.
- Akun merkkivalo palaa latauksen aikana punaisena. Kun akku on latautunut täyteen, merkkivalo muuttuu vihreäksi.

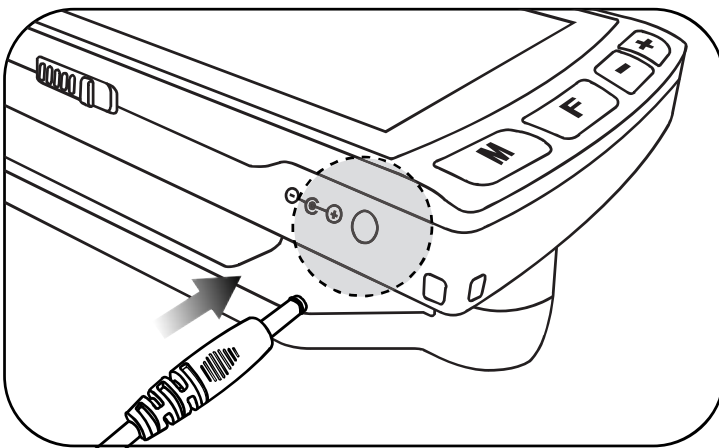


## 5-2. Näytön suojakalvon poistaminen


Kun CANDY5 HD toimitetaan, nestekidenäytön suojana on suojakalvo, jottei näyttö naarmuunnu tai vaurioidu kuljetuksen aikana. Poista kalvo ennen CANDY5 HD:n ensimmäistä käyttökertaa.

## 5-3. Kahvan käyttäminen

CANDY5 HD on ergonomisesti suunniteltu ja siinä on kolme kahvan asentoa, jotta laitteen käyttö on mukavaa sekä vasen- että oikeakätisille käyttäjille.

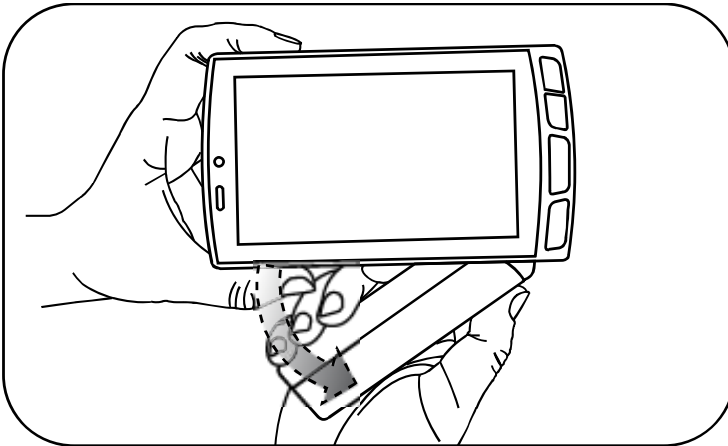


- Pitele laitetta toisella kädellä ja pyöritä kahvaa toisella. Katso edellä oleva kuva.
- Tunnet, miten kahva napsahtaa eri asentoihinsa. Katso seuraavalla sivulla oleva kuva.

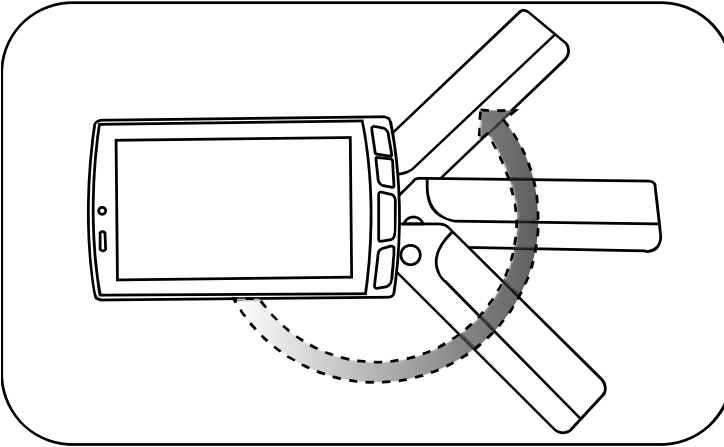

## 5-4. Jalan käyttäminen


CANDY5 HD:n alaosassa on taittuva jalka kahvaa vastapäätä. Kun taitat jalan esiin, kirjoja ja lehtiä on mukavampi lukea.

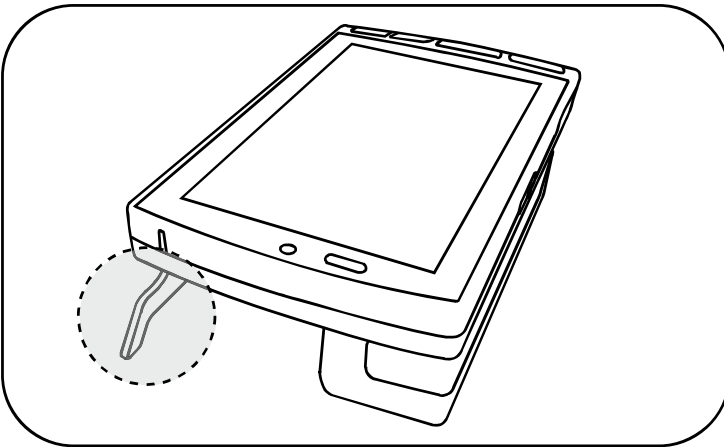

## 5-5. Lukutelineen käyttäminen

CANDY5 HD voidaan asettaa lukutelineeseen, jolloin kirjoja ja lehtiä on mukavampi lukea.

Aseta CANDY5 HD lukutelineeseen niin, että taittuva kahva on alaspäin lukutelineen avoimessa neliskulmaisessa paikassa.

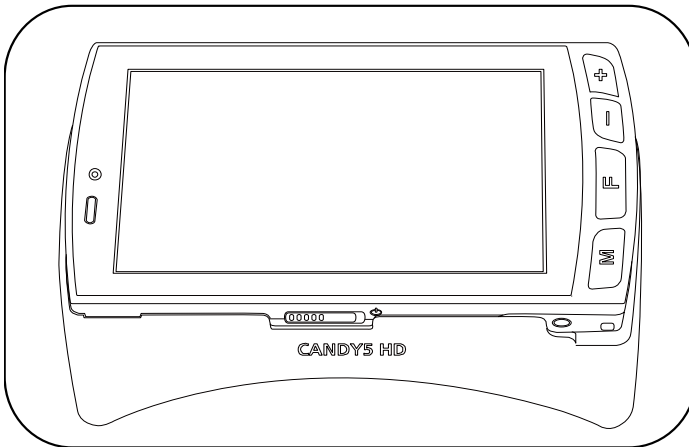


- Kun CANDY5 HD on lukutelineessä, suurennustaso on 2,5–10x.

※ Jos materiaali on kiiltävää, se voi häikäistä ja kuva voi vääristyä osassa näyttöä.

## 5-6. Rannehinnan asentaminen

Laitteessa on kaksi aukkoa seuraavan kuvan osoittamilla paikoilla.


Jos olet oikeakätinen, pujota rannehihna **väritilapainikkeen** alapuolella olevaan aukkoon. Jos olet vasenkätinen, pujota rannehihna **lähennyspainikkeen** alapuolella olevaan aukkoon.

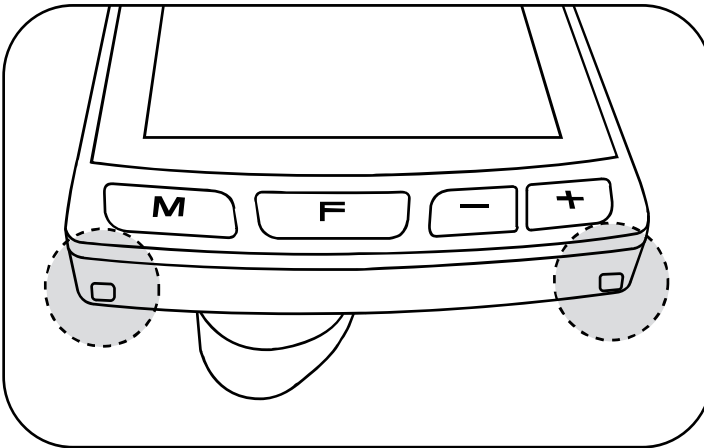

## 6. CANDY5 HD:n käyttäminen

### 6-1. Virta päälle/pois

- Kytke virta liu'uttamalla **virtakytkintä** oikealle. Suurennettu kuva näkyy näytössä noin kolmen sekunnin kuluttua.
- Sammuta virta liu'uttamalla **virtakytkintä** uudelleen oikealle.

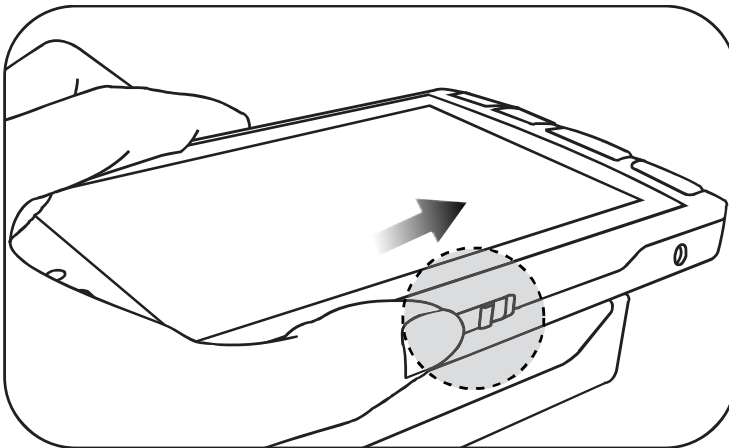


## ※ Akun tilan tarkistaminen

- Kun CANDY5 HD:hen on kytketty virta, akun latauskuvake näkyy näytössä muutaman sekunnin ajan latausnäytön avautumisen jälkeen.
- Akun latauskuvakkeessa on **viisi tasoa**: täysi, korkea, keskitaso, matala ja hyvin matala.
- Kun CANDY5 HD:tä ladataan vaihtovirtasovitin kytkettynä tasavirtaliittimeen, akun latauskuvake on **punainen**. Kun akku on ladattu täyteen, akun latauskuvake muuttuu **vihreäksi**. Jos vaihtovirtasovitin irrotetaan, akun latauskuvake muuttuu **siniseksi**.
- Akun tilakuvake vilkkuu, kun akun lataus on liian matala. Tällöin akku on ladattava.

## 6-2. Lähennä/loitonna

Voit muuttaa suurennustasoa sen mukaan, paljonko apua tarvitset ja mikä tuntuu sinusta mukavalta.

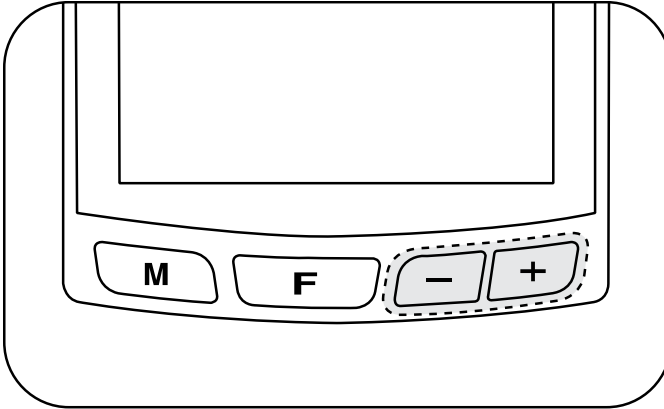


- Voit lisätä suurennustasoa painamalla **lähennyspainiketta**.
- Voit vähentää suurennustasoa painamalla **loitonnuspainiketta**.



## 6-3. Väritilojen muuttaminen

Voit muuttaa tekstin ja taustan väriä. Näin pystyt korostamaan kuvia tai tekstiä sekä optimoimaan selkeyden tarpeidesi mukaan erilaisilla materiaaleilla.

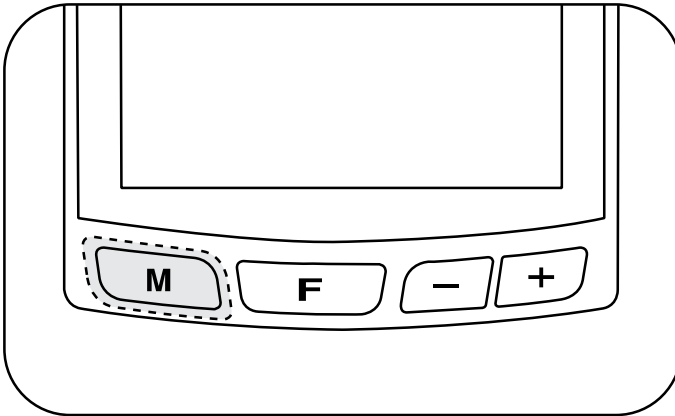


- Painamalla **väritilapainiketta** voit valita jonkin viidestä tuotteeseen sisältyvästä väritilasta.
- Väritilavaihtoehtoja on viisi. Kaikki väritilat luonnollista väritilaa lukuun ottamatta ovat käyttäjän määritettävissä kohdassa 6-7 Väritilojen käyttäminen kuvatulla tavalla.
- Huomaa: Käänteistä harmaasävytilaa käytetään luettaessa asiakirjoja, joissa on heikkokonstrastisia kirjaimia.

## 6-4. Tarkentaminen

CANDY5 HD:ssä on automaattisesti tarkentuva kamera. Jos teksti on kiiltävällä paperilla tai epätasaisella tai pyöreällä pinnalla, kuten vitamiinipullossa tai keittotölkissä, kuvaa on ehkä tarkennettava uudelleen.


### 6-4-1. Tarkennuksen säätäminen

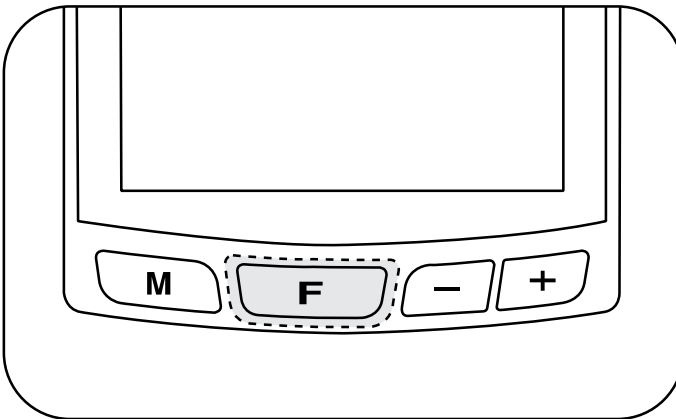

- Ellei kuva ole tarkka, tarkenna uudestaan painamalla **tarkennuspainiketta**. Tarkennuspainike toimii sekä automaattisen että manuaalisen tarkennuksen tilassa jäljempänä kuvatulla tavalla.

## 6-4-2. Tarkennustilan vaihtaminen

Voit siirtyä manuaaliseen tarkennustilaan, jos haluat yrittää tarkentaa kuvaa manuaalisesti. Voit siirtyä automaattiseen tarkennustilaan, jos haluat, että CANDY5 HD tarkentaa kuvaa automaattisesti.

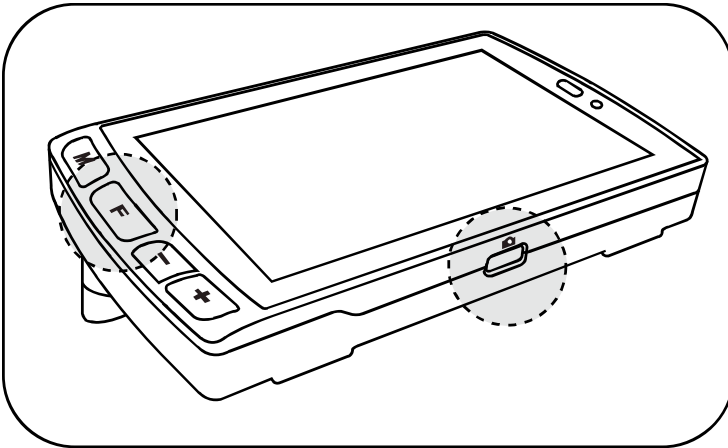

- **Manuaalinen tarkennustila**



[Manuaalinen  
tarkennus]

Kun olet automaattisessa tarkennustilassa, voit aktivoida manuaalisen tarkennustilan painamalla **tarkennuspainiketta** pitäen **kuvanpysäytyspainiketta** samalla painettuna. Manuaalisessa tarkennustilassa CANDY5 HD tarkentaa vain, kun painat **tarkennuspainiketta**.

- **Automaattinen tarkennustila**



[Automaattinen  
tarkennus]


Kun olet manuaalisessa tarkennustilassa, voit aktivoida automaattisen tarkennustilan painamalla **tarkennuspainiketta** pitäen **kuvanpysäytyspainiketta** samalla painettuna. Automaattisessa tarkennustilassa CANDY5 HD tarkentaa kuvan automaattisesti.

Huomaa: Oletusasetuksena on automaattinen tarkennustila.

## 6-5. Kuvan pysäytys/tallennus

### 6-5-1. Kuvan pysäytys


- **Kuvanpysäytyspainikkeita** on kaksi: toinen nestekidenäytön reunassa ja toinen kahvassa.

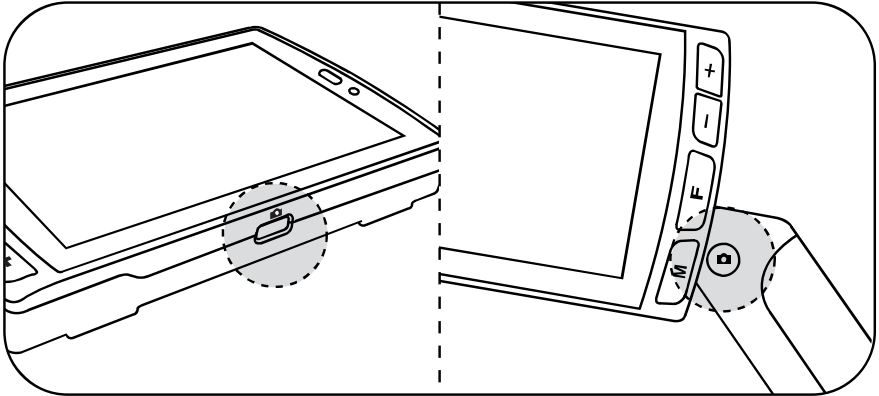

- Voit ottaa pysäytyskuvan painamalla **kuvanpysäytyspainiketta** ja vapauttamalla sen. CANDY5 HD ottaa pysäytyskuvan, kun painike vapautetaan.
- Kun haluat poistaa pysäytyskuvan näkyvistä ja palata kamerakuvatilaan, paina **kuvanpysäytyspainiketta** uudelleen.

## 6-5-2. Kuvan tallennus


- Kun katselet pysäytyskuvaa, paina **kuvanpysäytyspainiketta** yli kahden sekunnin ajan. Tällöin pysäytyskuva tallentuu muistiin. Seuraava kuvake tulee näkyviin, kun kuvaa tallennetaan.

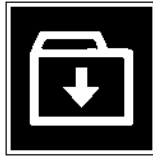


- Vain **viisi** kuvaa voidaan tallentaa. Jos tallennat uuden kuvan, vanhin tallennettu kuva poistetaan automaattisesti.

### 6-5-3. Tallennettujen kuvien katselu

- Voit katsella tallennettuja kuvia painamalla **väritilapainiketta** ja **tarkennuspainiketta** samanaikaisesti.

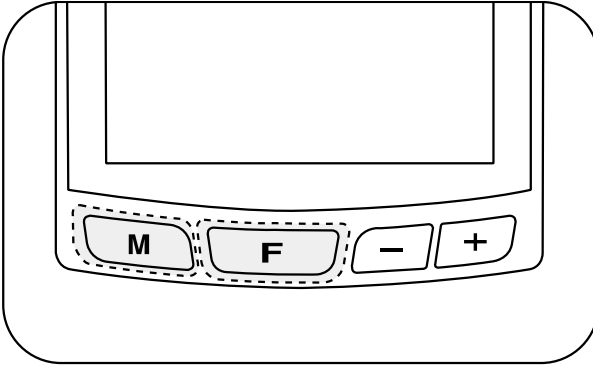

- Jos painat tämän jälkeen **tarkennuspainiketta** yhtäjaksoisesti, voit selata tallennettuja kuvia tallennusjärjestyksessä.
- Jos tallennettuja kuvia ei ole, näkyviin tulee Ei tallennettuja kuvia -kuvake.

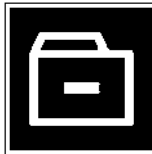


[Ei tallennettuja kuvia]


- Kun katselet tallennettua kuvaa, voit suurentaa sitä painamalla **lähennyspainiketta**.
- Voit lopettaa tallennettujen kuvien katselun painamalla **väritilapainiketta** ja **tarkennuspainiketta** uudelleen samanaikaisesti.

## 6-6. Peilikuva

CANDY5 HD:ssä on ainutlaatuinen peilikuvakamera.

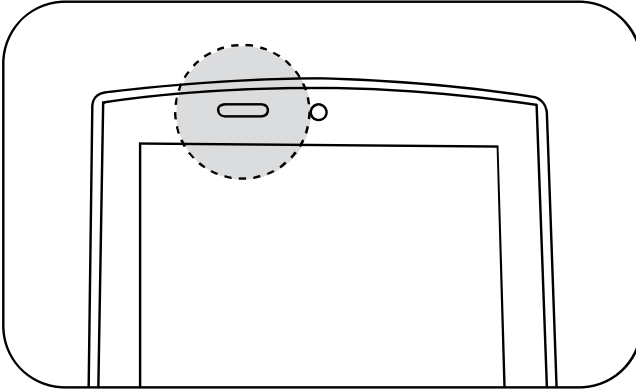

- Paina **kameranvalintapainiketta**, kun haluat vaihtaa kameran lukukamerasta peilikuvakameraksi. Seuraava kuvake näkyy sekunnin ajan ennen kameran vaihtoa.

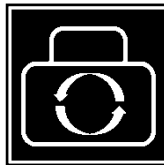

[Kamera vaihdettu

- Kun otat peilikuvakameran käyttöön, vain **lähennys-**, **loitonnu-** ja **kuvanpysäytyspainikkeita** sekä **virtakytkintä** voi käyttää. Näytössä näkyy kuitenkin peilikuva, ei kameran alla oleva teksti tai kuva.



- Voit ottaa lukukameran taas käyttöön painamalla **kameranvalintapainiketta** uudelleen.

## 6-7. Väritilojen käyttäminen

Voit valita väriyhdistelmän, joka vastaa näkötarpeitasi parhaiten. Voit myös poistaa väritiloja, joita et tarvitse.

Tuotteeseen sisältyy oletusarvon mukaan viisi väritilaa.


- Luonnollinen väritila
- (Valinta 1) Valkoinen mustalla
- (Valinta 2) Musta valkoisella
- (Valinta 3) Käänteinen harmaasävy
- (Valinta 4) Keltainen mustalla

Voit selata väritiloja painamalla **väritilapainiketta**.

## 6-7-1. Väritilojen asettaminen

Kaikkia muita paitsi luonnollista väritilaa voi muuttaa.

- Paina väritilapainiketta yli kolmen sekunnin ajan, jotta väritilan asetusikkuna tulee näkyviin. Tässä ikkunassa voit suorittaa seuraavat toiminnot.

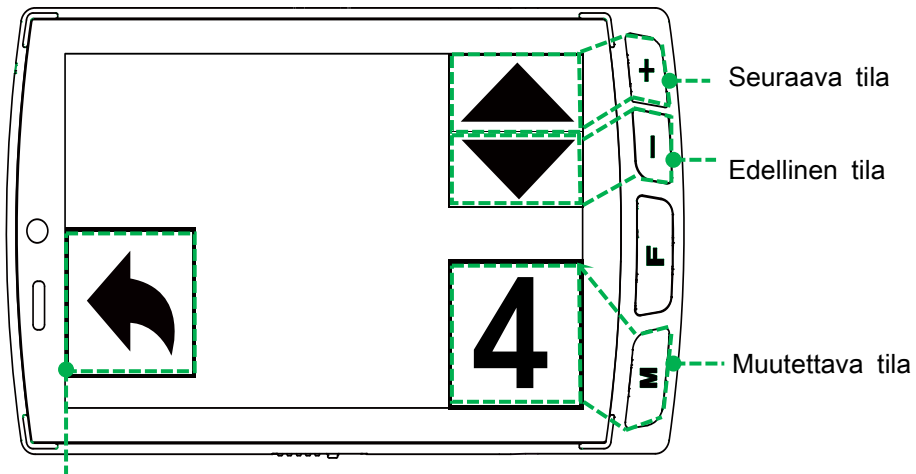


Peruuta asetus

### [Väritilan asetusikkuna]

- Siirry haluamasi tilan kohdalle käyttämällä lähennys- ja loitonnuspainikkeita. Näytössä näkyvä numero osoittaa valittuna olevan tilan numeron käytettävissä olevien tilojen luettelossa.
- Valitse muutettava tila väritilapainikkeella tai palaa kamerakuvatilaan kameranvalintapainikkeella.

## 6-7-2. Värien muuttaminen

- Värien asetusikkuna tulee näkyviin, kun muutettava tila on valittu.

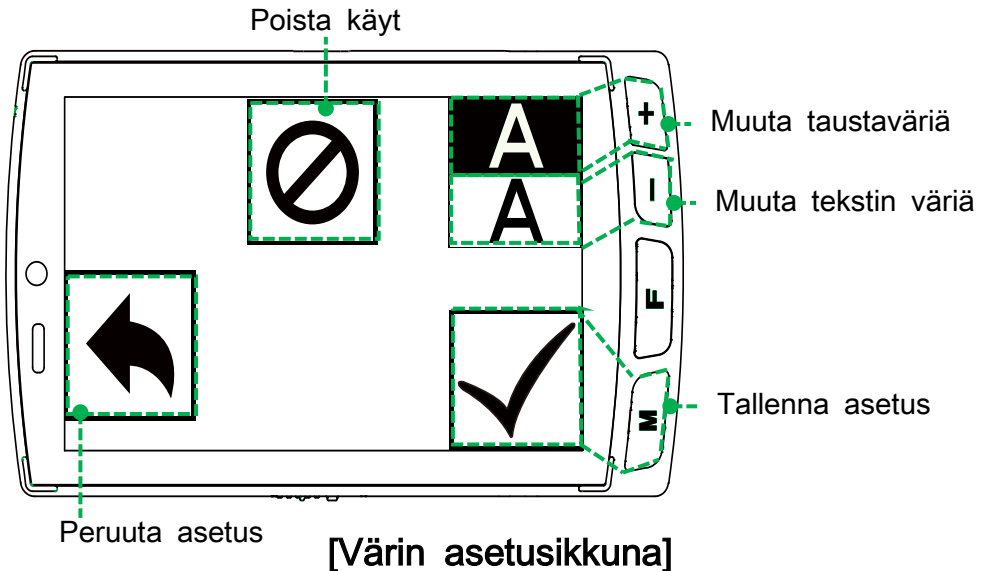


- Voit muuttaa taustaväriä painamalla lähennyspainiketta. Voit muuttaa tekstin väriä painamalla loitonnuspainiketta.
- Värivaihtoehtoja on 10: musta, valkoinen, keltainen, sininen, vihreä, punainen, magenta, syaani, harmaasävy ja käänteinen harmaasävy. Taustan väri ei voi olla sama kuin tekstin väri. Jos väri on sama, kumpikaan ei tule näkyviin.

- Kun haluamasi väriyhdistelmä on näkyvässä, paina **väritilapainiketta**. Asetuksesi tallentuu, ja se on valittavissa väritilaksi. Näkymä siirtyy takaisin väritilan asetusikkunaan.

### 6-7-3. Väritilojen poistaminen käytöstä

Voit poistaa tarpeettomat väritilat ja jättää jäljelle vain usein käyttämäsi väritilat.

- Pidä **väritilapainiketta** alaspainettuna yli **kolmen sekunnin ajan**. Väritilan asetusikkuna tulee näkyviin.
- Siirry **lähennys- tai loitonnuspainikkeella** sen väritilan kohdalle, jonka haluat poistaa käytöstä, ja paina **väritilapainiketta**.
- Huomaa: Väritila 1 on aina käytössä.
- Voit poistaa valitun väritilan käytöstä painamalla **kuvanpysäytyspainiketta**. Näkymä siirtyy takaisin väritilan asetusikkunaan. Käytöstäpoisto näkyy seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

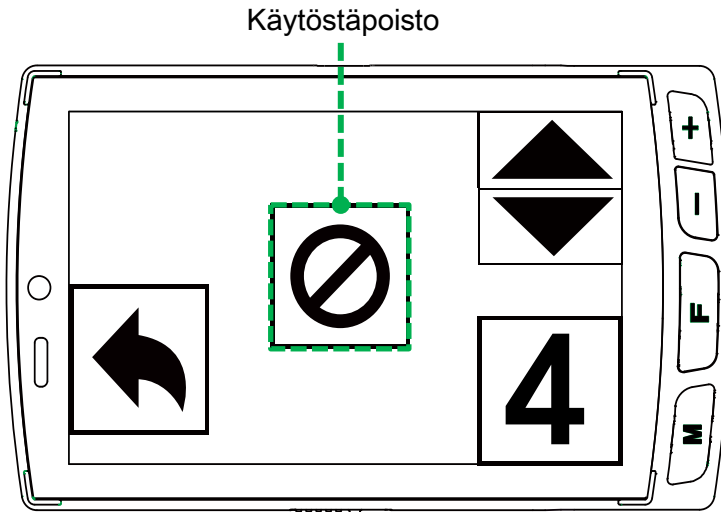

- Voit palata kamerakuvaan painamalla **kameranvalintapainiketta.**

## 6-7-4. Väritilojen ottaminen uudelleen käyttöön


Voit ottaa uudelleen käyttöön väritilat, joita haluat jälleen käyttää.

- Pidä **väritilapainiketta** painettuna yli **kolmen sekunnin** ajan.
- Siirry **lähennys-** tai **loitonnuspainikkeella** sen tilan kohdalle, jonka haluat ottaa uudelleen käyttöön.
- Valitse haluamasi tila painamalla **väritilapainiketta**.  
Voit ottaa käytöstä poistetun tilan uudelleen käyttöön painamalla **väritilapainiketta** uudelleen.
- Voit palata kamerakuvatilaan painamalla **kameranvalintapainiketta**.

## 6-8. Kello

CANDY5 HD:ssä on selkeä kello ajan tarkistusta varten.

### 6-8-1. Ajan tarkistus

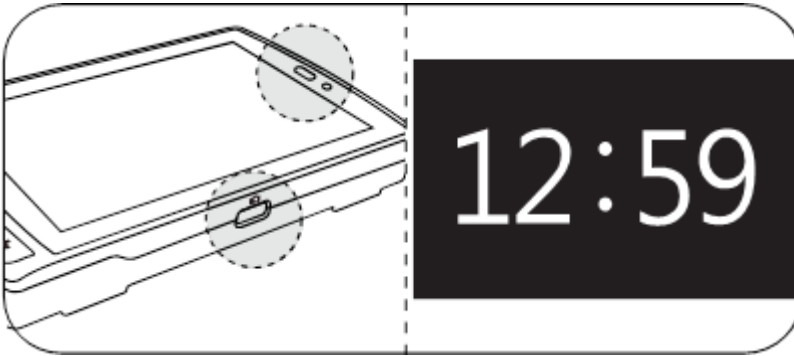

- Paina **kameranvalintapainiketta** pitäen **kuvanpysäytyspainiketta** samalla painettuna. Aika näkyy näytössä **kolmen sekunnin** ajan

### 6-8-2. Ajan asetus

- Voit asettaa ajan painamalla **kameranvalintapainiketta** pitäen **kuvanpysäytyspainiketta** samalla painettuna. Kello tulee näkyviin. Kun toistat tämän toiminnon, aika alkaa vilkkua.


- Voit muuttaa tunteja painamalla **kameran-valintapainiketta**. Tunnit vaihtuvat järjestyksessä 01:stä 12:teen.
- Voit muuttaa minuutteja painamalla **tarkennuspainiketta**. Minuutit vaihtuvat järjestyksessä 00:sta 59:ään.
- Voit tallentaa aika-asetukset ja poistua painamalla **väritilapainiketta**.



## 6-9. Muut toiminnot

### 6-9-1. Nestekidenäytön kirkkauden säätö

Voit säätää nestekidenäytön kirkkautta näkötarpeidesi ja mieltymystesi mukaan.

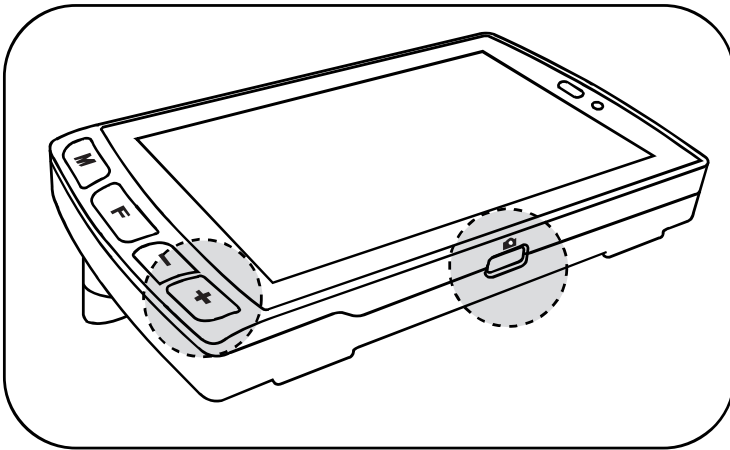

- Vaihda kirkkaustasoa painamalla yhtä aikaa lähennyspainiketta ja kuvanpysäytyspainiketta.
- Kun painat näitä painikkeita, kamera käy läpi kolme kirkkaustasoa.



[Taso 1]




[Taso 2]



[Taso 3]

## 6-9-2. LED-valojen tila

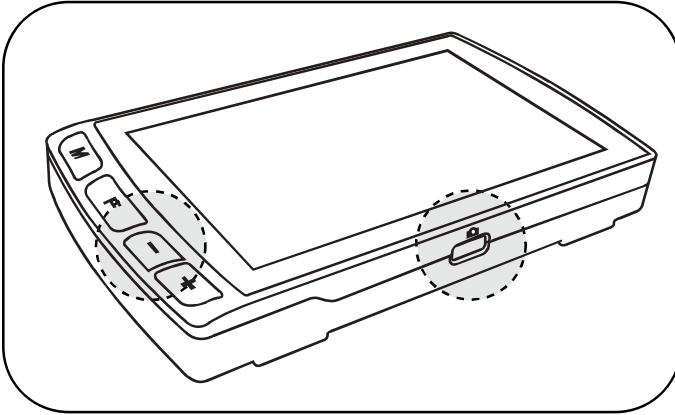

- Paina lähennyspainiketta ja kuvanpysäytyspainiketta yhtä aikaa, kun haluat muuttaa LED-valojen tilaa.
- LED-valoille voidaan määrittää kolme eri tilaa:



[Automaattinen LED]



[LED pois]



[LED päällä]

- Automaattisten valojen tilassa valot sammuvat automaattisesti, jos nostat laitteen pois luettavalta materiaalilta. Valot syttyvät taas, kun siirrät

CANDY5 HD:tä lähemmäs luettavaa materiaalia. Tämä toiminto estää häikäisemästä LED-valoilla vahingossa kenenkään silmiä.

- Kun sammutat CANDY5 HD:n, laite siirtyy automaattisesti takaisin oletusarvon mukaiseen LED päällä -tilaan.

### 6-9-3. Virransäästötila


CANDY5 HD:ssä on virransäästötila akun säästämistä varten.

- Ellet liikuta laitetta tai paina mitään painiketta yli **kahteen minuuttiin**, nestekidenäyttö sammuu. Tämä on virransäästötila.
- Kun virransäästötila on päällä, akun latautumisen merkkivalo vilkkuu punaisena.
- Jos liikutat laitetta tai painat mitä tahansa painikkeita virransäästötilan ollessa aktivoituneena, nestekidenäyttö syttyy automaattisesti.

- Ellet liikuta laitetta tai paina mitään painiketta yli kolmeen minuuttiin virransäästötilan aktivoitumisen jälkeen, laitteen virta sammuu automaattisesti.

### ✘ Virransäästötilan ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- Voit ottaa virransäästötilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä liu'uttamalla **virtakytkintä** oikealle kahden sekunnin ajan pitäen lähennyspainiketta ja

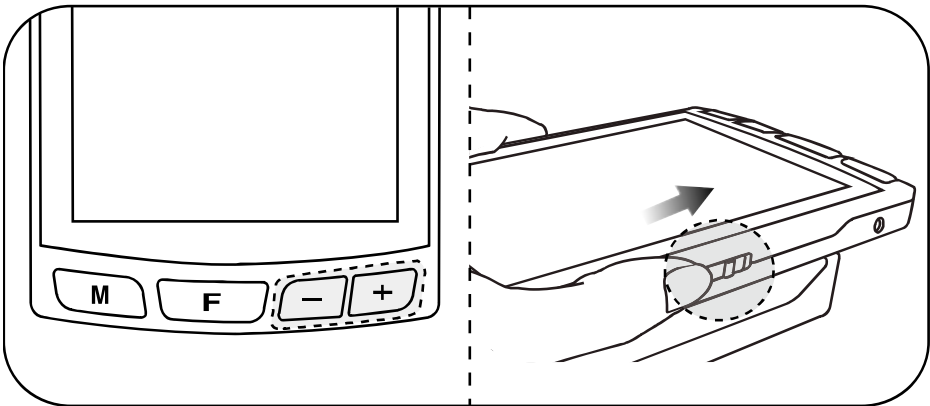


**loitonuspainiketta** painettuina virran ollessa sammutettuna.

- Näytön vasempaan kulmaan tulee kuvake, joka osoittaa virransäästötilan valinnan. Kun

virransäästötila on käytössä, kuvake on vihreä.  
Kun virransäästötila on poissa käytöstä, kuvake on punainen.

#### 6-9-4. Äänimerkkien ottaminen päälle / pois päältä

Jokaisella painikkeella on oma äänimerkki, joka vahvistaa, että painiketta on painettu. Äänimerkit voi ottaa päälle tai pois.

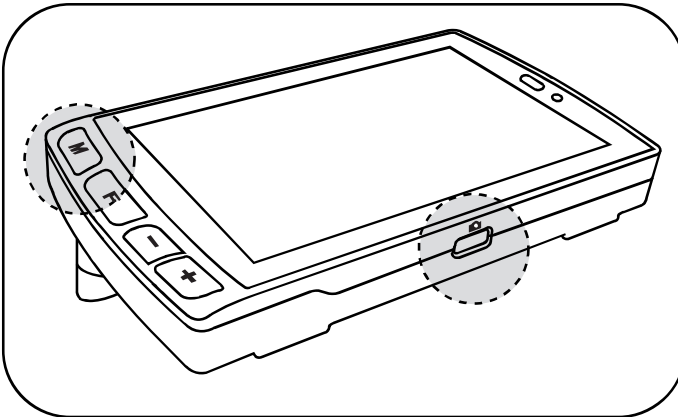

- Voit ottaa äänimerkit päälle tai pois painamalla värityspainiketta ja kuvanpysäytyspainiketta yhtä aikaa.



[Äänimerkki päällä]




[Äänimerkki pois]

## 6-9-5. Tehdasasetusten palautus

Jos CANDY5 HD ei toimi halutulla tavalla, mutta et ole varma muuttuneesta asetuksesta, voit palauttaa laitteen tehdasasetukset.

- Kun yksiköstä on sammutettu virta, liu'uta **virtakytkintä** oikealle **kahden sekunnin** ajan pitäen **tarkennuspainiketta** painettuna.

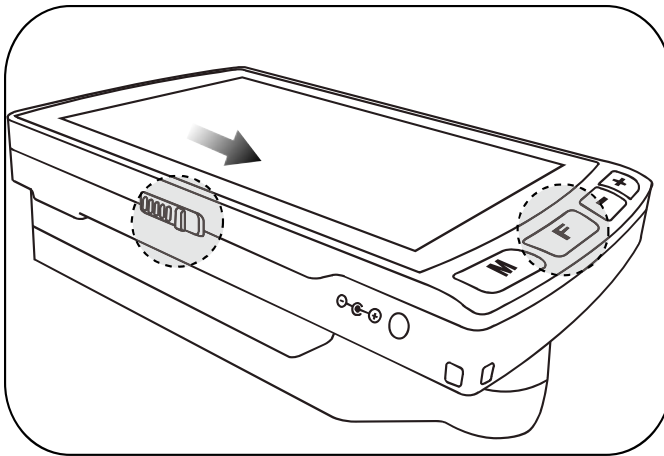

- CANDY5 HD käynnistyy tehdasasetuksilla.  
Huomautus: Kaikki tallennetut kuvat poistetaan tehdasasetusten palautuksen yhteydessä.

## 7. Vianmääritys

### 7-1. CANDY5 HD:hen ei syty virta

- Jos akku on täysin tyhjä, laitteeseen ei syty virta. Tällöin CANDY5 HD voi vaikuttaa vialliselta.
- Kytke vaihtovirtasovitin tasavirtaliittimeen ja lataa akkua vähintään kolme tuntia.

### 7-2. CANDY5 HD:hen syttyy virta, mutta kuvaa ei näy nestekidenäytössä

- **Kuvanpysäytyspainiketta** on ehkä painettu vahingossa. Tällöin CANDY5 HD voi vaikuttaa vialliselta. Jos kuvanpysäytystoiminto on aktivoituna, voit poistaa sen käytöstä painamalla **kuvanpysäytyspainiketta** uudelleen.
- Jos CANDY5 HD on päällä, mutta sitä ei ole käytetty yli kahteen minuuttiin, CANDY5 HD siirtyy virransäästötilaan. Voit poistua virransäästötilasta liikuttamalla CANDY5 HD:tä tai painamalla jotakin painiketta.

### **7-3. Automaattitarkennus ei toimi**

- Tarkista tarkennustila. Jos käytössä on manuaalinen tarkennustila, kamera tarkentaa vain, kun painat **tarkennuspainiketta**. Voit vaihtaa automaattiseen tarkennustilaan painamalla yhtä aikaa **tarkennuspainiketta** ja **kuvanpysäytyspainiketta**.

### **7-4. Nestekidenäyttö vaikuttaa likaiselta, vaikka olet puhdistanut näytön**

- Jos kameran objektiivissa on pölyä, kuva näyttää epätarkalta eikä automaattitarkennus toimi kunnolla. Puhdista kamera tuotteen mukana toimitetulla nestekidenäytön puhdistusliinalla.

### **7-5. Äänimerkkien ottaminen pois käytöstä**

- Kun painat mitä tahansa painiketta, kuulet oletusarvon mukaan äänimerkin. Ellet halua kuulla äänimerkkejä, voit ottaa ne pois käytöstä painamalla yhtä aikaa **väritilapainiketta** ja **kuvanpysäytyspainiketta**.



## 7-6. Näytön kuva on liian pimeä tai liian kirkas

- Voit säätää näytön kirkkautta painamalla yhtä aikaa lähennyspainiketta ja kuvanpysäytyspainiketta. Kirkkaustasoja on kolme. Mitä korkeampi taso, sitä kirkkaampi näyttö.
- Kuva voi myös olla liian pimeä, jos LED-valo on sammutettuna. Voit sytyttää LED-valon painamalla yhtä aikaa loitonuspainiketta ja kuvanpysäytyspainiketta

## 7-7. Nestekidenäyttö sammuu äkillisesti

- CANDY5 HD siirtyy virransäästötilaan, kun sitä ei ole käytetty yli kahteen minuuttiin. Voit poistua virransäästötilasta liikuttamalla CANDY5 HD:tä tai painamalla jotakin painiketta. Jos CANDY5 HD ei toimi yli kolmeen minuuttiin, virta on sammutettuna ja laite on käynnistettävä ennen sen käyttöä.
- Jos akku on täysin tyhjentynyt, laitteen virta sammuu. Kytke verkkolaite tasavirtaliittimeen ja lataa akkua vähintään kolme tuntia, ennen kuin yrität käyttää laitetta.

## **7-8. Laitetta on ladattu täyteen pitkän aikaa, mutta laite toimii vain hyvin vähän aikaa**

- Akun käyttöikä voi lyhentyä ajan mittaan. Mitä pitempään akkua on käytetty, sitä vähemmän aikaa se kestää.
- Jos akun käyttöikä lyhenee, akku voidaan vaihtaa. Jos akku on yli kuusi kuukautta vanha, käyttäjän on vaihdettava se omalla kustannuksellaan.
- Jos akun annetaan tyhjentyä kokonaan säännöllisesti, sen käyttöikä lyhenee. Voit pitää akun toiminnassa mahdollisimman pitkään lataamalla akkua usein, jottei se tyhjene täysin.

## 8. Takuu

- CANDY5 HD:hen liittyy maksuton huoltopalvelu kahden vuoden ajan ostopäivämäärästä valmistajan virheiden korjaamiseksi.
  - Akun takuu-aika on kuusi kuukautta. Käyttäjän aiheuttamat vauriot, jotka voivat johtua esimerkiksi laitteen pudottamisesta, raskaiden esineiden asettamisesta laitteen päälle tai nesteiden joutumisesta laitteeseen, eivät sisälly takuuseen, ja käyttäjän on korjautettava ne omalla kustannuksellaan.
- ※ Huomautus: takuu voi olla erilainen eri maissa.

Jälleenmyyjä:

## **Low Vision Inno Oy**

Sirrikuja 3L

00940 Helsinki

Puh: 040 777 1320

Sähköposti: [info@lowvision.fi](mailto:info@lowvision.fi)

[www.lowvision.fi](http://www.lowvision.fi)



Valmistaja:

**Worldwide Corporate Headquarters**

## **HIMS International Corporation**

174, Gajung-ro, Yuseong-gu,

Daejeon, KOREA

+82 42 864 4460

[www.himsintl.com](http://www.himsintl.com)

