

MagniLink Zip

Full HD
1080p



- nouvelle génération

reddot award 2015
winner



MagniLink Zip

MagniLink Zip – encore plus performant

Le téléagrandisseur MagniLink ZIP pliable est réputé pour sa qualité d'image et son utilisation intuitive. Ces qualités ont été optimisées et ce téléagrandisseur s'est, en outre, enrichi de nouvelles fonctionnalités.

Une qualité d'image exceptionnelle

Jouissant de la même renommée que l'ancien MagniLink Zip pour sa qualité d'image, il n'a plus rien à envier à ce dernier ! Nous avons concentré tout notre savoir-faire et les techniques d'amélioration d'image avec une caméra Full HD pour produire la meilleure qualité d'image dans un téléagrandisseur.

Design

La conception de ce téléagrandisseur a été modernisée et s'inscrit dans la lignée du design LVI primé*, introduit avec MagniLink Vision. L'adaptation à la basse vision a été améliorée et MagniLink ZIP n'a jamais été aussi simple à utiliser.

Un véritable téléagrandisseur

Ce téléagrandisseur portable offre les mêmes fonctionnalités que tous les véritables téléagrandisseurs, avec une table de lecture avec des freins de friction X/Y, des lignes de guidage, un moniteur adapté à la basse vision – et une excellente qualité d'image !

Une caméra à distance intégrée

Une caméra à distance, réglable à la fois verticalement et horizontalement, est incluse.

Fonction nouvelle!

Léger et simple à transporter

Plier et transporter MagniLink Zip n'a jamais été aussi simple. Il est nettement plus petit par rapport à l'ancienne version – notamment une fois replié – et ne pèse que 3,8 kg (pour le petit modèle).

Hauteur -52 %



Les 10 meilleurs fonctionnalités et avantages

1 **La meilleure qualité d'image**

Une caméra Full HD associée à des techniques optiques et logicielles qui permettent au téléagrandisseur de produire des images encore plus étonnantes.

2 **Pliable et portatif – tout en restant un véritable téléagrandisseur**

Contrairement à de nombreux autres téléagrandisseurs, c'est un véritable CCTV qui conserve tous ses avantages exceptionnels.

3 **Design**

Conçu pour offrir un bon confort d'utilisation. Le design a été récompensé par le prestigieux prix Red Dot Award.

4 **Simple à utiliser**

Panneau de contrôle intuitif pourvu à la fois de boutons rotatifs et de touches qui le rendent extrêmement aisé à utiliser – tout en offrant un mode avancé aux utilisateurs expérimentés.

5 **Moniteur adapté aux malvoyants**

Le moniteur MagniLink Zip est pourvu de bords d'écran de couleurs vives, d'une surface antireflets, d'une excellente netteté, d'un contraste élevé et d'un variateur de luminosité pour les utilisateurs sensibles à la lumière.

6 **Table de lecture leader du marché**

La table X/Y MagniLink Zip est plus fine que jamais, tout en offrant les mêmes stabilité et qualité que les autres tables X/Y MagniLink, incluant des freins de friction.

7 **Modulable**

Choisissez entre la qualité HD ou Full HD, la batterie et la table de lecture. Ce téléagrandisseur possède de nombreuses options pour répondre à tous les besoins ou aux spécifications techniques des appels d'offre.

8 **Tout en un**

Le modèle Full HD de 17" offre une mobilité optimale, avec une table X/Y, une batterie, une excellente qualité d'image, une mallette de transport et une caméra à distance. Vous ne trouverez aucun autre téléagrandisseur aussi complet que ce modèle !

9 **Un grossissement initial véritablement très faible**

Optez pour la qualité Full HD pour le grossissement le plus faible possible. Idéale pour les personnes souffrant de RP.

10 **Affichage à distance intelligent**

Caméra à distance intégrée et pivotante pour un confort optimal et une mise au point manuelle pour un contrôle total (voir page 11).

Modèles MagniLink ZIP

Quatre modèles – encore plus de possibilités


MagniLink ZIP est décliné en quatre modèles avec de nombreuses fonctionnalités. En associant deux tailles d'écran, la batterie et la table X/Y, le nouveau MagniLink ZIP répondra aux besoins de tous les utilisateurs, dans toutes les situations. Avec la caméra à distance intégrée, incluse dans tous les modèles, MagniLink ZIP est le choix idéal pour les étudiants.

1 MagniLink Zip HD 13

Le modèle le mieux adapté à la mobilité :
Moniteur de 13,3" et caméra HD, avec
batterie, sans table X/Y.

2 MagniLink Zip FHD 13

Identique au MagniLink Zip HD 13,
mais équipé d'une caméra Full HD.

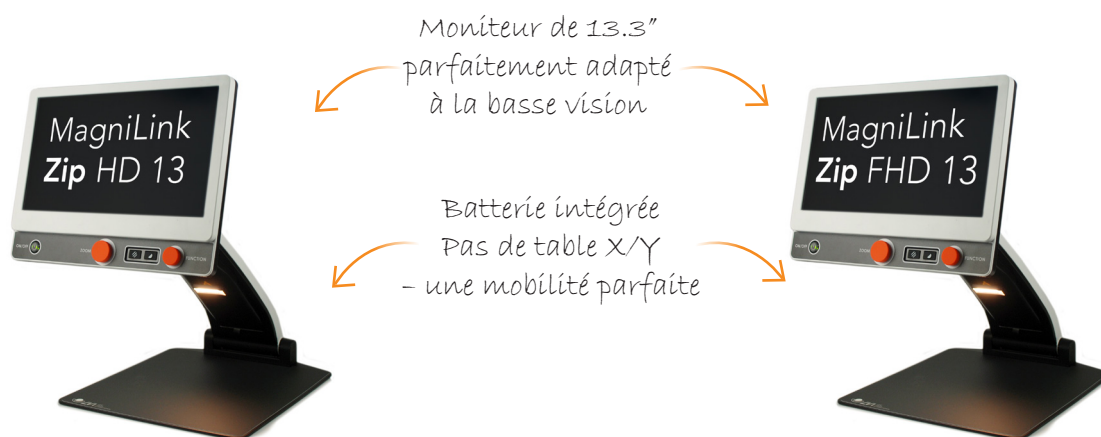

3 MagniLink Zip HD 17

Moniteur de 17,3", caméra HD et
table X/Y intégrée. Sans batterie.

4 MagniLink Zip FHD 17

Identique au MagniLink Zip HD 17,
mais équipé d'une caméra Full HD.





Simple à plier et à transporter

MagniLink Zip 13

MagniLink Zip 13 - HD/Full HD

Portatif et pratique

MagniLink Zip 13 est le modèle le mieux adapté à la mobilité avec son moniteur de 13,3" adapté à la basse vision et équipé d'une caméra à distance/de lecture HD ou Full HD. Il est fourni sans table X/Y pour gagner en légèreté. Ce qui permet de le plier, de le déployer et de le transporter d'un point à un autre en toute facilité.



Une batterie avec une autonomie de 5-9 heures pour une utilisation nomade. L'autonomie de la batterie dépend de l'intensité lumineuse sélectionnée pour l'écran et la lampe. MagniLink ZIP 13 est le choix idéal pour les utilisateurs se déplaçant fréquemment avec leur appareil. Il est également adapté aux utilisateurs recherchant un système aux lignes élégantes, pouvant être plié et rangé facilement lorsqu'ils ne l'utilisent pas.

Vous avez le choix entre la qualité HD et Full HD. La qualité Full HD apporte la meilleure qualité d'image qui soit, et c'est le choix idéal pour les utilisateurs souffrant de RP en raison de son contraste exceptionnel et du grossissement initial faible.

Une caméra à distance pivotante est incluse



Modèle	Référence	Caméra	Table de lecture	Batterie
MagniLink Zip HD 13	MLZIP-HD-13	HD	Non	Oui
Modèle 01 en option	MLZIP-13-01	HD	Non	Non
Modèle 02 en option	MLZIP-13-02	HD	Oui	Oui
Modèle 03 en option	MLZIP-13-03	HD	Oui	Non
MagniLink Zip Full HD 13	MLZIP-FHD-13	Full HD	Non	Oui
Modèle 04 en option	MLZIP-13-04	Full HD	Non	Non
Modèle 05 en option	MLZIP-13-05	Full HD	Oui	Oui
Modèle 06 en option	MLZIP-13-06	Full HD	Oui	Non

HD
720p

Full HD
1080p



MagniLink Zip 17



HD
720p

Full HD
1080p

MagniLink Zip 17 - HD/Full HD

Un véritable téléagrandisseur portable

MagniLink Zip 17 est un véritable téléagrandisseur portable avec une caméra à distance et de lecture de qualité HD ou Full HD. Il est fourni avec un moniteur de 17,3" et une table X/Y stable pour une lecture confortable et un contrôle précis. Il possède tous les fonctions offertes par un téléagrandisseur de bureau ; il peut, en outre, être plié et transporté aisément.

Il représente un bon choix pour les utilisateurs lisant fréquemment et devant parfois emporter leur téléagrandisseur à différents endroits, par exemple à la maison et au bureau, à l'hôtel, à la maison de vacances, etc. Avec son design stylisé et compact, MagniLink ZIP trouvera sa place à la maison, à l'école et sur le lieu de travail.

Vous avez le choix entre la qualité HD et Full HD. La qualité Full HD offre la meilleure qualité d'image et c'est le choix idéal pour les utilisateurs souffrant de RP en raison de son contraste exceptionnel et du grossissement initial faible.

Une caméra à distance pivotante est incluse




Modèle	Référence	Caméra	Table de lecture	Batterie
MagniLink Zip HD 17	MLZIP-HD-17	HD	Oui	Non
Modèle 01 en option	MLZIP-17-01	HD	Oui	Oui
Modèle 02 en option	MLZIP-17-02	HD	Non	Non
Modèle 03 en option	MLZIP-17-03	HD	Non	Oui
MagniLink Zip Full HD 17	MLZIP-FHD-17	Full HD	Oui	Non
Modèle 04 en option	MLZIP-17-04	Full HD	Oui	Oui
Modèle 05 en option	MLZIP-17-05	Full HD	Non	Non
Modèle 06 en option	MLZIP-17-06	Full HD	Non	Oui

Fonctionnement de base

Facile et intuitif

Le panneau de contrôle MagniLink ZIP est extrêmement simple à utiliser, avec des boutons logiques et des touches que chacun peut comprendre et utiliser aisément et très rapidement.

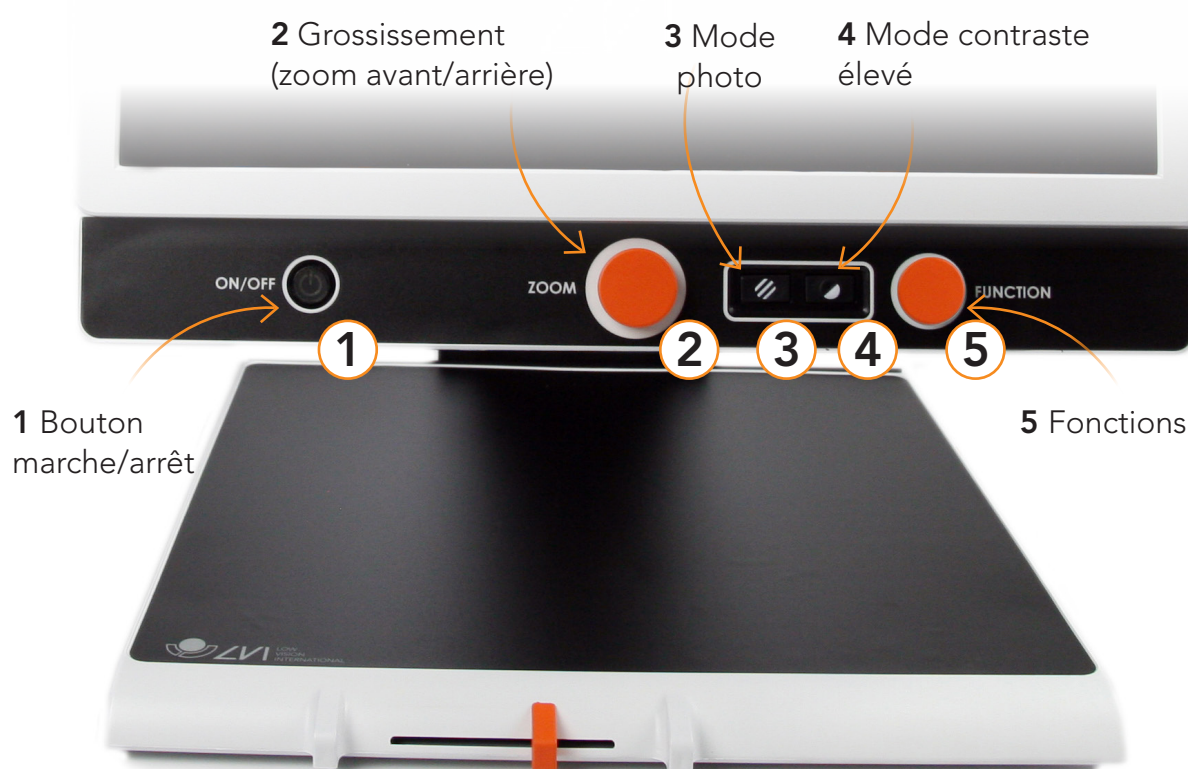

Commandes – mode de fonctionnement de base

1 Bouton marche/arrêt

Met le système sous ou hors tension.

2 Grossissement (zoom avant/arrière)

Augmente/réduit le niveau de grossissement.

Astuce :

Appuyez sur cette touche pour passer au mode Aperçu. Appuyez à nouveau sur cette touche pour revenir au niveau de grossissement sélectionné.

3 Mode photo

Permet de sélectionner soit les couleurs naturelles, soit l'image avec des nuances de gris.

4 Mode contraste élevé


Permet de sélectionner parmi les combinaisons des couleurs artificielles.

5 Fonctions

Permet d'ajuster la luminosité/le contraste.

Ou sophistiqué

Alors que MagniLink ZIP est extrêmement simple à utiliser en mode de fonctionnement de base, il répond en même temps aux besoins des utilisateurs plus exigeants avec son mode de fonctionnement avancé. Cette solution fait de MagniLink ZIP un excellent choix pour un large éventail d'utilisateurs.

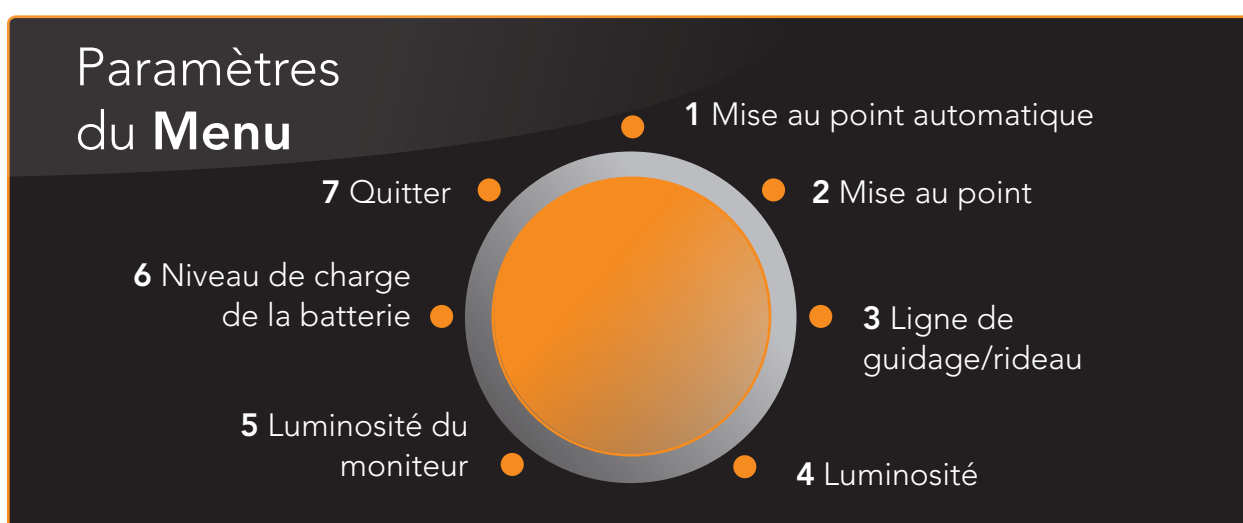

Menu – mode pleines fonctions

1 Mise au point automatique

Permet de sélectionner soit la mise au point automatique, soit la mise au point manuelle.

2 Mise au point

Pour modifier la mise au point manuellement (images A, B).



En mode de mise au point manuelle, c'est l'utilisateur qui décide quand utiliser la caméra à distance et effectuer, par exemple, la mise au point sur le tableau blanc et non sur les objets situés devant lui.

3 Ligne de guidage/rideau

Sélectionnez la ligne de guidage verticale, la ligne de guidage horizontale, le rideau vertical ou le rideau horizontal, puis réglez la position.

4 Luminosité

Permet de modifier le niveau de luminosité.

5 Luminosité du moniteur

Permet d'augmenter/de réduire la luminosité du moniteur.

6 Niveau de charge de la batterie (si disponible). Affiche le niveau de charge réel de la batterie.

7 Quitter et revenir au mode de fonctionnement de base

Permet de quitter le menu (retourne au mode de fonctionnement de base).

L'histoire du nouveau MagniLink Zip

Lorsque nous décidâmes de développer le nouveau MagniLink ZIP, notre équipe de développement fut confrontée à une série de défis à relever. Par exemple, le produit devait être plus léger et plus compact une fois plié – sans compromettre la qualité d'image ou les fonctionnalités. Nous avons interrogé Joachim Schill, membre de l'équipe d'ingénieurs qui développa la nouvelle génération de MagniLink ZIP. Voici l'histoire de la naissance du nouveau MagniLink ZIP.

Le défi technique


Nous voulions que le nouveau MagniLink ZIP soit le plus compact possible. Néanmoins, l'enquête menée auprès de nos clients soulignait l'importance d'une image de haute qualité et d'une table de lecture robuste et nous décidâmes que le nouveau MagniLink ZIP devait réunir tous les avantages et toutes les fonctionnalités d'un véritable téléagrandisseur.

Nous avons collaboré avec un studio de design industriel, Myra Design, et nous sommes parvenu à rendre le système lui-même et la table de lecture nettement plus compacts qu'auparavant. Nous aurions même pu le rendre encore plus petit, mais cela nous aurait obligés à faire des compromis sur les fonctionnalités, ce qui était impensable à nos yeux.

La conception du panneau de contrôle a également été modifiée suite aux impressions de nos clients. Les boutons sont plébiscités par nos clients en raison de leur aisance d'utilisation. En outre, ils nous permettent de faire évoluer le système car il sera plus aisé d'ajouter des fonctionnalités ultérieurement. Il est, par conséquent, possible de désélectionner des fonctions. En fin de compte, nous avons conçu un système qui est à la fois simple et sophistiqué – sans qu'il soit nécessaire d'ajouter ou de supprimer des touches.

Le défi en termes de qualité d'image

Le précédent modèle était réputé pour sa qualité d'image et il était important pour nous d'offrir une qualité d'image qui sortait de l'ordinaire. Nous avons choisi de proposer la qualité Full HD, bien que la haute résolution fût déjà par elle-même suffisante pour obtenir une image de haute qualité. Forte d'une expérience de plus de 35 ans,

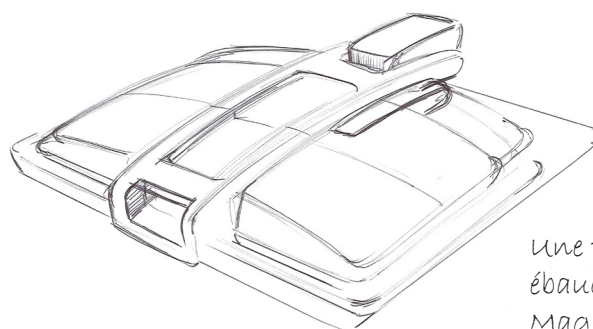

Une première ébauche du MagniLink Zip NG



Joachim Schill
Ingénieur et
concepteur, LVI

notre équipe travailla sur l'optique, les conditions d'éclairage et le logiciel afin d'améliorer encore plus la qualité d'image. Je pense que le résultat du travail que nous avons accompli est remarquable. C'est probablement la meilleure image jamais produite dans un téléagrandisseur, sans oublier qu'il s'agit d'un téléagrandisseur pliable.

Le savoir-faire LVI

Certaines fonctionnalités ont vu le jour au cours du processus. Parmi ces fonctionnalités, nous pouvons citer la caméra à distance. Lors d'un déjeuner de travail, une idée apparut, ce qui permit à la caméra de trouver automatiquement la position correcte lorsque le système est replié. Dans les modèles précédents, les utilisateurs devaient régler manuellement la position de la caméra au dos de l'écran. Cette procédure engendra un certain nombre de problèmes de fonctionnement qui ont complètement disparu aujourd'hui.

Ce savoir-faire démontre aussi la force que possède un fabricant qui sait s'adapter. Nous avons la capacité de mettre en œuvre de nouvelles idées et fonctionnalités basées sur les réflexions de nos clients. Comment cela est-il possible ? Vingt pour cent de notre personnel au siège social sont directement impliqués dans le processus d'ingénierie et de développement **et** les divisions de production, de conception, d'ingénierie et de marketing sont toutes rassemblées sous un même toit. Aucun autre fabricant ne possède une organisation similaire. Elle nous permet de prendre de nouvelles décisions rapidement. En outre, nous maintenons un dialogue régulier avec nos clients, ce qui nous permet de connaître rapidement leurs impressions. Par ailleurs, nous intégrons leurs idées précieuses dans notre processus de conception. Cette manière de procéder nous permet finalement de proposer de meilleurs produits et mieux adaptés aux besoins de nos utilisateurs.

Le résultat

Le nouveau MagniLink Zip est le résultat de toute notre expérience et tout notre savoir-faire combinés au cours de nos 35 ans dans l'industrie. C'est un produit qui reflète nos valeurs essentielles. Il se place lui-même à l'avant-garde des technologies modernes, de part sa qualité d'image, son utilisation intuitive, son design et sa qualité. Cela démontre à nouveau que LVI est en mesure de maintenir sa position en tant que l'un des principaux fabricants mondiaux dans son domaine d'activité.

C'est un produit dont nous sommes très fiers – un produit qui sera bénéfique aux utilisateurs.

Joachim Schill
Ingénieur et concepteur



Tables ergonomiques

Tables pour une expérience renouvelée

Il est extrêmement important de s'asseoir dans une position adéquate et ergonomique lorsque vous travaillez avec les téléagrandisseurs. LVI propose des tables de haute qualité, réglables en hauteur et adaptées à nos téléagrandisseurs MagniLink.

Table MagniLink 60x80 cm, version mécanique PV06-01

Sa conception est idéale pour l'accès aux personnes en fauteuil roulant. Le dessus de la table en bouleau stratifié mesure 80 cm de large et 60 cm de profondeur. La table est fournie avec un support couleur argent et un jeu complet de roues, dont deux peuvent être bloquées. Réglage en hauteur manuel (61-91 cm).



Réglage en hauteur motorisé



Table MagniLink 60x80 cm, version motorisée PV06-03

Cette table est identique au modèle PV06-01, tout en permettant un réglage en hauteur motorisé pour un confort maximum. Le support est formé d'une colonne unique. Il est possible de régler la hauteur entre 50 et 83 cm.

Table MagniLink 60x60 cm, version mécanique F20

La table F20, de faible encombrement, est simple à installer. La hauteur de travail de la table se règle manuellement en toute facilité (57-79 cm). Un disque coulissant est inclus. La table est dotée de roues et d'un cadre de couleur argent.



Le saviez-vous..?

- Un affichage sur écran guide l'utilisateur dans toutes les fonctions de contrôle
- Des touches de fonction sont disponibles pour passer du mode de fonctionnement de base au mode de fonctionnement avancé et inversement
- Il est possible d'afficher en alternance le mode aperçu et le mode de grossissement sélectionné – fonction très utile si vous ne savez plus où vous vous trouvez dans le texte grossi

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

	MagniLink Zip 13"	MagniLink Zip 17"
Caméra	HD 720p/ FHD 1 080p	HD 720p/ FHD 1 080p
Résolution	1 600x900	1 920x1 080
Plage d'agrandissement	1,3-35x (HD) 1,1-35x (Full HD)	1,7-45x (HD) 1,4-45x (Full HD)
Autonomie de la batterie	5-9 h*	5-9 h*
Temps de charge	Environ 2,5 h	Environ 2,5 h
Dimensions, plié	33x45x9 cm 13x17,5x3,5"	44x47x12 cm 17,3x18,5x4,7"
Dimensions, déployé	33x45x51 cm 13x17,5x20,1"	44x47x56 cm 17,3x18,5x22,5"
Poids	4,2 kg** 9,4 livres**	6,9 kg*** 15,3 livres***
Source d'énergie	Batterie ou courant alternatif	

* En fonction du niveau de luminosité

** Batterie incluse (3,8 kg/8,6 livres sans batterie)

*** Table X/Y incluse

La société LVI Low Vision International est reconnue comme étant l'un des plus grands fabricants d'assistance à la basse vision. Sa mission consiste à faciliter la vie quotidienne des personnes souffrant de déficiences visuelles.

Nous sommes certifiés ISO 14001 & 9001



LVI Low Vision International Belgium

Bouwelsesteenweg 10 D, 2560 Nijlen
Tel. 03/455.92.64, Fax. 03/455.92.88
E-mail. info@lvi.be

Succursale en Wallonie :

Chaussée de Bruxelles 151, 6040 Jumet
Tel. 0473/78.15.23

WWW.LVI.BE

LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5,
352 46 Växjö, SWEDEN
Tel.: +46 470 72 77 00
Fax: +46 470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se

WWW.LVI.SE



LOW
VISION
INTERNATIONAL
MagniLink Zip_150625