

Manual för BookSense/BookSense XT

version 3.0



Återförsäljare:

LVI Low Vision International AB

Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö

Tel: +46 470 – 727700
Fax: +46 470 – 727725

E-mail: info@lvi.se
Internet: www.lvi.se

Innehållsförteckning

1. Allmänt.....	3
Förpackningens innehåll	3
Säkerhetsinformation	4
2. Beskrivning av BookSense	5
3. Sätta i/ta ur batteriet.....	6
4. Ladda batteriet	8
5. Starta och stäng av BookSense	9
6. Sätta i och ta ur SD-kortet	9
7. Ansluta tillbehör	10
8. Ansluta till dator	11
9. Grunder för användargränssnittet	12
10. Växla mellan program i BookSense	15
11. Justera volym	15
12. Spela/pausa	15
13. Inspelning	16
14. Kontrollera datum och tid	16
15. Växla lagringsmedia	17
16. Hjälppläge	17
17. Knapplås	17
18. Felsökning	18
19. Rengöring	20

Bilaga: Summering av BookSense kommandon grundläggande funktioner.....	23
---	----

1. Allmänt

Tack för att du valt den digitala DAISY-spelaren BookSense. BookSense är tillverkad av HIMS International Corporation, som har skapat den populära produktlinjen SENSE. BookSense är en mycket bekväm bärbar produkt som kan spela upp innehåll från digitala ljudböcker, ljudfiler, dokument och DAISY. BookSense finns som standard- eller XT-modell.

Denna manual beskriver hur du ansluter och laddar batteriet, hur du startar och stänger av BookSense, hur hjälpläget och användargränssnittet fungerar samt hur du förhindrar oavsiktliga knapptryck.

För ytterligare information, se den engelska användarhandboken (www.lvi.se/Produkter/Daisyspelare/BookSense)

Förpackningens innehåll

- 1) BookSense eller BookSense XT
- 2) Uppladdningsbart batteri
- 3) Strömadapter
- 4) Lång USB-kabel (för att anslutning till dator)
- 5) Kort USB-kabel (för att anslutning av USB-minne)
- 6) Hörlurar
- 7) SD-minneskort
- 8) Bärpåse
- 9) Band
- 10) Snabbguide

Säkerhetsinformation

BookSense måste användas i enlighet med nedanstående säkerhetsinstruktioner.

Använd endast medföljande nätadapter. Kontrollera att produktens höljen eller strömadapter inte är skadade.

Spänningssätt eller använd inte BookSense om den är skadad eller blivit utsatt för regn, vatten eller andra vätskor. Skadad eller blöt produkt kan orsaka elektriska stötar eller brand.

Vidta inga ytterligare justeringar om du inte förmår att erhålla normala funktioner genom att följa funktionsbeskrivningarna, utan kontakta din återförsäljares servicepersonal.


Stäng alltid av strömmen när produkten inte används. Vid osäkerhet, kontakta er återförsäljare.




För att förhindra brand eller stötar, utsätt inte utrustningen för regn eller fukt.

För att undvika risk för elektriska stötar, avlägsna inte produktens hölje. Invändigt finns inga utbytbara delar som användaren själv får byta. Överlåt service och reparation till kvalificerad servicepersonal.

2. Beskrivning av BookSense

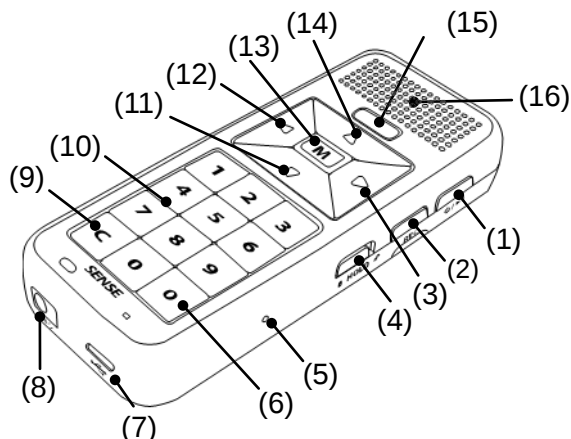

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Strömknapp | 9) Avbrytknapp |
| Spela/pausknapp | 10) Numeriska knappar |
| 2) Inspelningsknapp | (0~9) |
| 3) Högerknapp | 11) Pil ner |
| 4) Knapplås | 12) Vänsterknapp |
| 5) Återställningsknapp | 13) Menyknapp |
| 6) OK-knapp | 14) Pil upp |
| 7) USB-port | 15) Tid-/datumknapp |
| 8)Uttag för strömadapter | 16) Högtalare |

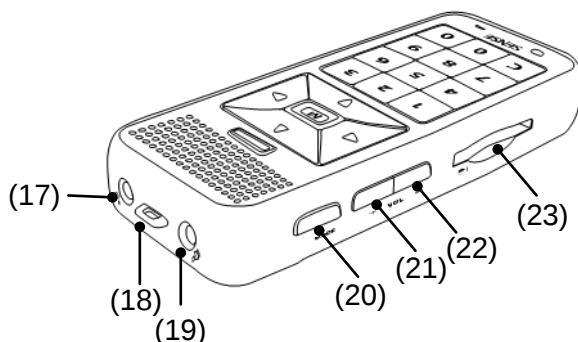


- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 17)Uttag för hörlurar | 20) Programknapp (mode) |
| 18) Bandfäste | 21) Volymknapp - upp |
| 19) Mikrofoningång | 22) Volymknapp - ner |
| | 23) Fack för SD-kort |

3. Sätta i/ta ur batteriet

För att sätta i batteriet, följ dessa steg:

- 1) Utsidan på batteriet är blank med en logotyp ingraverad. Insidan är grov med två infällda delar längst ner.
- 2) Håll BookSense i handen så att framsidan med de numeriska knapparna är vänd nedåt. Sätt först i botten av batteriet med de infällda snitten och tryck sedan in övre kanten på plats.

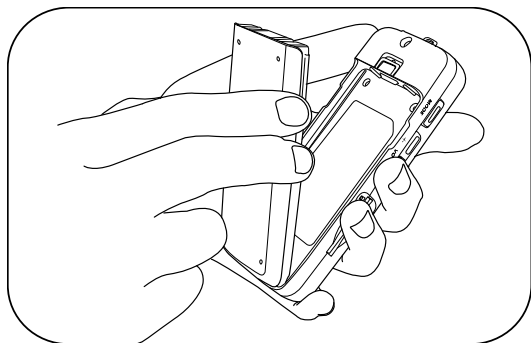


- 3) Några sekunder efter att batteriet satts in kommer du höra ett ljud som indikerar att BookSense startar upp, följt av meddelandet, "Media" som indikerar att du är i Medialäget för programmet.


OBS! Batteriet är utformat för att enbart passa i rätt riktning. Om du känner något motstånd är det troligt att du har batteriet upp och ner. Se till att batteriet sitter ordentligt på plats.

För att ta bort batteriet, följ dessa steg:

- 1) Lägg BookSense i handen med baksidans logotype uppåt.
- 2) Vrid BookSense så att bandfästet är vänt mot dig.
- 3) Hitta batterispärren precis ovanför det lilla skruvhålet.

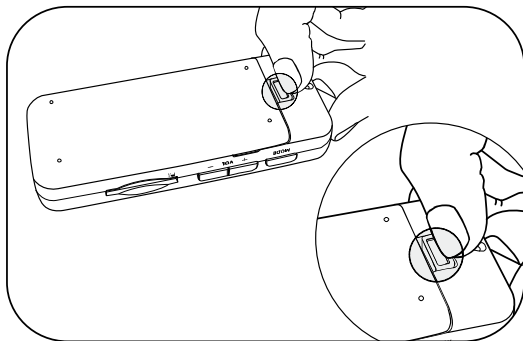

- 4) Tryck batterispärren mot dig.

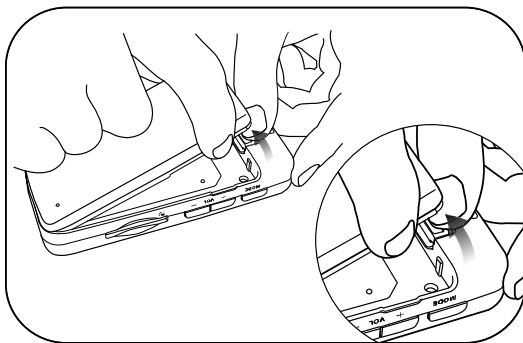


- 5) Greppa batteriet och dra försiktigt uppåt i de små spår du hittar på vardera sidan av batteriet.

4. Ladda batteriet

Håll BookSense med sifferknapparna mot dig, då hittar du det runda uttaget för strömadaptern till vänster på nedre kanten.

- 1) Anslut den medföljande strömadaptern till strömuttaget.
- 2) En full uppladdning tar cirka 2,5 timmar.

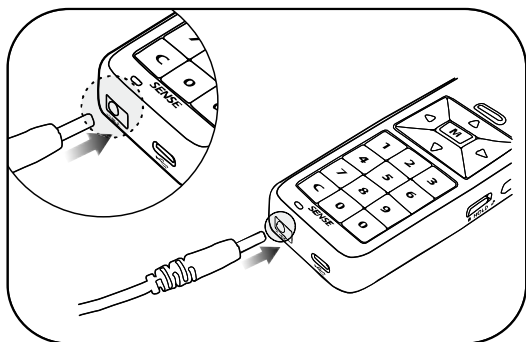

Obs! Första gången du laddar BookSense måste produkten laddas i minst 2,5 timmar. Du kan använda BookSense medan den laddas. Om du vill kontrollera batteristatusen, håll ner OK-knappen i 2 sekunder. Statusen på batteriet anges på en skala mellan 1 och 10.

5. Starta och stäng av BookSense

Du hittar strömknappen, som även fungerar som spela /pausa-,knapp, längst upp till höger på sidan av enheten.


- 1) Håll ner knappen i 2 sekunder för att starta BookSense.
- 2) För att stänga av enheten när den är på, håll ner samma knapp i 2 sekunder.

6. Sätta i och ta ur SD-kortet


Vänd framsidan av enheten mot dig så hittar du platsen för SD-kortet på den nedre vänstra sidan av enheten.

För att sätta i SD-kortet, följ dessa steg:

- 1) Håll SD-kortet med det avskurna hörnet upp till höger när du sätter i det i SD-facket.

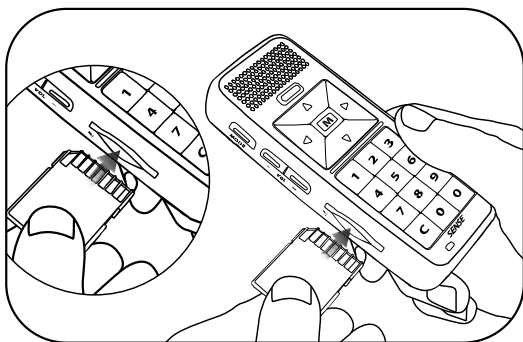

- 2) Tryck försiktigt in SD-kortet i facket tills det klickar på plats.

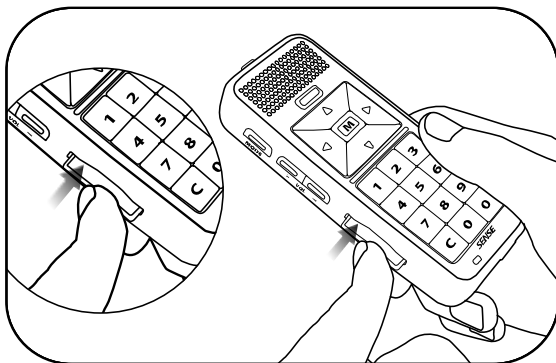

3) Om BookSense är påslagen, kommer du att höra ett ljud (ding-dong) som bekräftar att SD-kortet är på plats.

För att ta ut SD-kortet, följ dessa steg:

- 1) Tryck försiktigt in SD-kortet i facket tills det klickar ut och släpp det sedan.
- 2) Om BookSense är påslagen kommer du att höra ett knäppljud som bekräftar att du tagit ut SD-kortet.


7. Ansluta tillbehör

Via USB-ingången (7), hörlursuttaget (17) och/eller ljudingången (19) kan valfritt tillbehör kopplas in till BookSense, så länge de följer vanlig standard (för hörlursuttaget 8Ω, jack 3.5 pi). För BookSense-XT gäller att tillbehör även kan anslutas trådlöst via Bluetooth genom att trycka tangent "6" i mer än två sekunder.

8. Ansluta till dator

Vänd framsidan mot dig så hittar du USB-porten på högra sidan av enhetens framkant. För att överföra filer mellan din dator och BookSense, följ dessa steg:

1) Starta BookSense och anslut den lilla änden av den långa USB-kabeln till USB-porten och den större änden till datorn.

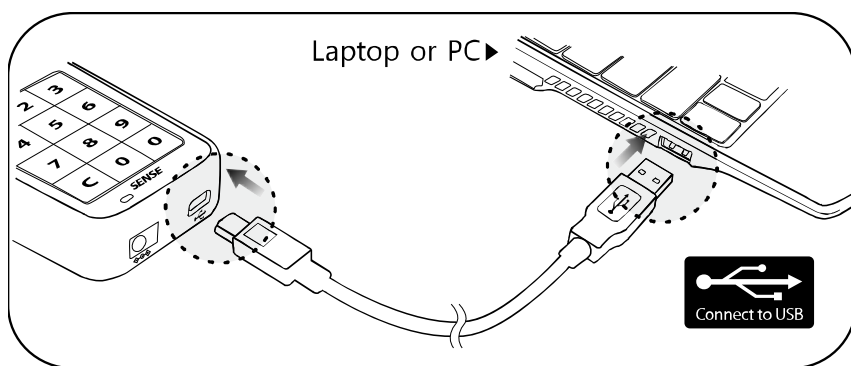

2) När du anslutit till datorn ska BookSense dyka upp som en flyttbar enhet i utforskaren (visas endast för XT-modellen). Har du ett SD-kort i BookSense ska denna också visas som en flyttbar enhet.

3) Kopiera filerna från datorn och klistra in i de angivna mapparna under "BookSense" eller "Flyttbar disk" (syns endast om ett SD-kort är isatt). Till exempel bör musikfiler kopieras till mappen Media.

Obs! När BookSense är ansluten till datorn går det inte att använda enheten. Om BookSense är avstängd, kommer datorn inte känna igen den.

9. Grunder för användargränssnittet

BookSense har utformats med ett enkelt och intuitivt gränssnitt för användarvänlighetens skull. I detta avsnitt kommer vi att gå igenom de grundläggande funktionerna i BookSenses användargränssnitt.

BookSense består av två huvuddelar: filhanteraren och uppspelningsdelen (i alla program förutom Radio).

Fil- och mappstrukturen

Fil- och mappstrukturen i BookSense arrangeras i listvyer. Genom att trycka på upp/nerpilarna kan du navigera i listorna.

- Med vänster/högerpilarna flyttar du bakåt eller framåt en nivå i katalogstrukturen.
- Du kan även använda siffrorna 1 till 6 för att navigera snabbt. Tryck på nummer 8 för att flytta till en specifik indexerad fil.
- När du trycker på spelaknappen på en fil eller mapp börjar BookSense att spela upp innehållet.
- Tryck på avbrytknappen för att avsluta uppspelningen av det aktuella innehållet och du återvänder till fillistan.

Uppspelning

I Uppspelningsdelen kan du välja olika förflyttningseenheter. Dessa ändras genom att trycka på upp/nerpilarna. Med vänster/högerpilar hoppar du bakåt och framåt inom den valda förflyttningseenheten.

Siffrorna 1 till 3 används för märkning av filer och nummer 4 till 6 används för att justera

uppspelningshastigheten i alla lägen förutom Radio.

Meny

Varje program och läge på BookSense har sin egen meny. Denna når du alltid genom att trycka på menyknappen som sitter i mitten av pilknapparna. Varje meny innehåller flera menyalternativ som du kan navigera i med hjälp av pilarna upp/ner. Om menyn är av typen rullgardin betyder det att det finns undermenyer. Genom att trycka på vänster och högerpilarna kan du flytta bakåt eller framåt en nivå i menystrukturen, precis som du navigerar i fillistan. När du är placerad på den menyn som du vill öppna, tryck på meny eller ok-knappen. Annars kan du trycka på avbryttnappen för att återgå till den plats där du var tidigare.

Om menyalternativet är en dialog, kommer det att öppnas en dialogruta med minst en inställning att justera. Inställningarna kan vara av typen kombinationsrutor eller redigeringsrutor.

En kombinationsruta kan bestå av flera poster. Du kan navigera bland dessa med upp/nerpilarna. För att ändra värdet på kombinationsrutorna använder du pilarna vänster/höger.

I en redigeringsruta använder du den numeriska knappsatsen för att ange ett värde. Tryck på avbryttnappen om du behöver radera en siffra. Tryck på ok- eller menyknappen för att spara inställningarna.

Inspelning

Du kan skapa en inspelning oavsett var du befinner dig i BookSense. När du är klar kan du lyssna på inspelningen som du just gjort genom att trycka på ok- eller spela/pausaknappen.

OBS! Om du är i Radioläge kommer den kanal som du lyssnar på att spelas in.

Datum och tid

Du kan enkelt kontrollera datum och tid när om helst med den dedikerade tid- och datumknappen, som du hittar längst upp på framsidan av enheten.

Denna funktion fungerar även när BookSense är avstängd, under förutsättning att knappsatsen inte är låst.

Ytterligare kommandon

En lång tryckning (2 sek) på många av sifferknapparna ger ytterligare kommandon. För en komplett lista över dessa kommandon, se bilagan.

10. Växla mellan program i BookSense

Programknappen hittar du längst upp på BookSenses vänsterkant. Med denna knapp växlar du bland BookSenses fyra olika program i följande ordning: Media, Daisy, Textläsare och Radio.

OBS! Radio är endast tillgänglig för BookSense XT.

11. Justera volym

Volymknapparna är placerade på BookSenses vänsterkant precis under program-/lägesknappen. Det finns separata volyminställningar för hörlurar och den inbyggda högtalaren, samt olika volyminställningar för talsyntesen och ljuduppspelningen. Under uppspelning justeras volymen ljudlöst. Om uppspelningen är pausad anges värdet av talsyntesen. Volymen justeras på en skala mellan 1 och 21.

12. Spela/pausa

Spela/pausaknappen finns längst upp på enhetens högra kant.

När du har hittat filen eller mappen du vill lyssna på trycker du på spela/pausaknappen eller ok-knappen för att starta uppspelningen.

Tryck på spela/pausaknappen för att pausa uppspelningen och tryck igen för att återuppta den.

För att stoppa den aktuella uppspelningen och återgå till fillistan tryck på knappen avbryt.

13. Inspelning

Inspelningsknappen hittar du på BookSenses högerkant precis under spela/pausknappen.

Nedan listas olika sätt att hantera en inspelning:

- 1) För att starta en inspelning, håll ner inspelningsknappen i 2 sekunder.
- 2) För att pausa och återuppta inspelningen trycker du på inspelningsknappen igen.
- 3) För att stoppa inspelningen tryck på spela/pausknappen eller ok-knappen.

OBS! Befinner du dig i Radioläget spelas den aktuella radiokanalen in om du gör en inspelning.

14. Kontrollera datum och tid

Knappen för datum och tid finns längst upp på framsidan av enheten. När du trycker på knappen meddelas både tid och datum. Knappen fungerar även när BookSense är avstängd.

15. Växla lagringsmedia

För att växla lagringsmedia, håll ner sifferknappen 0 i 2 sekunder. Detta växlar mellan de tillgängliga lagringsmedierna i BookSense, som kan vara: SD-Kort, USB-minne eller Flash-minne.

OBS! Flashminne är endast tillgängligt i BookSense XT.

16. Hjälppläge

BookSense erbjuder ett utmärkt hjälppläge som du kan aktivera när som helst oavsett vilket program du befinner dig i. Eftersom knapparna i BookSense har olika funktioner beroende på vilket program du använder är det bra att hjälppläget alltid är tillgängligt. Aktivera hjälppläget genom att hålla ner menyknappen i 2 sekunder. BookSense bekräftar detta genom att säga "Hjälppläge aktivt". Nu läser BookSense upp de funktioner som är kopplade till de olika knapparna du trycker på. För att stänga av hjälppläget, håll ner menyknappen i 2 sekunder. BookSense bekräftar detta genom att säga "Hjälppläge inaktiverat" och du kan fortsätta använda enheten som vanligt.

17. Knapplås

Du hittar Knapplåset på BookSenses vänsterkant under inspelningsknappen.

För att låsa knapparna skjuter du knapplåset nedåt.

OBS! Du kan inte Starta BookSense eller kontrollera datum och tid om knapplåset är på.

18. Felsökning

Om du har några problem med din BookSense, försök följande för att lösa ditt problem:

1) BookSense startar inte

Kontrollera att batteriet sitter korrekt i sitt fack.

Om batteriet är rätt isatt, anslut nätadaptern och sätt den i ett eluttag. Batteriet kan behöva laddas.

Kontrollera knapplåset, om det är på kan BookSense inte starta.

2) BookSense slutar ge respons

Tryck på reset-knappen.

För att göra en fullständig återställning:

Medan du trycker ner nr 4, tryck och släpp resetknappen på samma gång. Fortsätt att hålla ner nr 4 i ytterligare 20 sekunder. BookSense bör nu vara återställd.

Ta ut batteriet och sätt tillbaka det efter 10 sekunder. Vänta i 30 till 60 sekunder så startar BookSense.

3) Problem vid skanning av radiokanaler (BookSense XT)

Om inte mottagningen av radiostationer fungerar när du skannar går det att öka känsligheten för BookSense. För att ändra känsligheten för kanalsökning, tryck på knapp nr 7. Du kan justera från 1 till 10, standard-inställningen är 4. Ju högre tal desto högre känslighet, vilket innebär att du kan söka efter fler kanaler. Det är också starkt rekommenderat att använda hörlurarna och inte de externa högtalarna. Men om du

använder de externa högtalarna, se till att hörlurarna är anslutna för de ska användas som en antenn. För mer information om hur du gör detta, se avsnittet Radio.

4) Det kommer inget ljud när du använder Bluetooth

Kontrollera om ditt Bluetooth-headset har A2DP-funktion, eftersom BookSense XT stödjer A2DP. De flesta Bluetooth stereo 2,0 headset stödjer A2DP.

5) Det kommer inget ljud från de inbyggda högtalarna eller hörlurarna

BookSense ger dig möjlighet att justera volymen separat för både hörlurarna och de interna högtalarna. När du ansluter hörlurar till enheten, kan volymen justeras för hörlurarna. Du kan också justera volymen för de inbyggda högtalarna. Detta innebär att volymen kommer att vara annorlunda beroende på om du lyssnar via hörlurar eller de inbyggda högtalarna. Så om du inte kan höra något ljud från hörlurarna eller de inbyggda högtalarna, måste du höja volymen när hörlurarna är anslutna till enheten. Om du inte kan höra något ljud från de inbyggda högtalarna, måste du öka volymen för de interna högtalarna när hörlurarna inte är anslutna till enheten.

19. Rengöring

Som daglig skötsel kan man torka bort damm med vanlig fuktig trasa – använd ej starka rengöringsmedel som exempelvis innehåller alkohol.

Tänk på att först dra ut nätsladden om BookSense behöver rengöras. Spraya ej vätska direkt på BookSense, då det är risk för att vätska tränger in i apparaten.



BookSense uppfyller alla krav för CE-märkning.



Bortskaffande av gamla elektriska och elektroniska apparater (gäller för EU samt andra europeiska länder med särskilda insamlingssystem)

Om produkten eller dess förpackning är försedd med denna symbol, ska den inte hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in till ett lämpligt insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Genom att svara för att denna produkt omhändertas på rätt sätt, hjälper du till att förhindra den negativa påverkan på miljö och människors hälsa, som annars skulle kunna bli en följd av olämplig avfallshantering av denna produkt. Materialåtervinning bidrar till hushållningen av naturresurser. För att få närmare information om återvinning av denna produkt, kan du att kontakta din kommun, ditt renhållningsföretag, eller den butik där du köpte produkten.

Återförsäljare:

LVI Low Vision International AB

Verkstadsgatan 5, 352 46 Växjö

Tel: +46 470 – 727700

Fax: +46 470 – 727725

E-mail: info@lvi.se

Internet: www.lvi.se

Tillverkare:

HIMS International Corporation

139-9, Gajung-dong, Yuseong-gu, Daejeo, Korea 305-350

Telefon: +82-42-864-4601

Fax: +82-42-864-0133

E-mail: hims@himsintl.com

Internet: www.himsintl.com



Bilaga: Summering av BookSense kommandon

Grundläggande funktioner

Starta/stäng av:

Håll ner spela/pausknappen i 2 sekunder.

Växla mellan BookSense program:

Tryck på programknappen.

Flytta mellan objekt i en meny eller lista:

Tryck på pil upp och ner.

Flytta framåt/bakåt en nivå i en meny eller katalog:

Tryck på pil höger/vänster

Spela upp valt objekt:

Tryck på spela/pausknappen.

Pausa/återuppta uppspelning:

Tryck på spela/pausknappen.

Stoppa uppspelning:

Tryck på knappen avbryt.

Spela in en röstanteckning:

Håll ner inspelningsknappen i 2 sekunder.

Pausa/återuppta inspelningen:

Tryck på inspelningsknappen.

Stoppa inspelning:

Tryck på spela/pausknappen eller ok-knappen.

Kontrollera datum och tid:
Tryck på datum och tidknappen.

Kontrollera batteristatusen:
Håll ner ok-knappen i 2 sekunder.

Växla lagringsmedia:
Håll ner nummer 0 i 2 sekunder.

Ställ automatisk avstängning:
Håll ner nummer 4 i 2 sekunder.

Växla mellan manlig och kvinnlig röst:
Håll ner nummer 5 i 2 sekunder.

Aktivera och avaktivera Bluetooth:
Håll ner nummer 6 i 2 sekunder.

Aktivera och Inaktivera hjälpläget:
Håll ner menyknappen i 2 sekunder.

Sätt knapplås:
Skjut knapplåset nedåt

Lås upp knapplås:
Skjut knapplåset uppåt.

Gå till menyn:
Tryck på menyknappen.

2. Menyer och inställningar

Flytta mellan menyalternativ:

Tryck på pil upp och ner.

Öppna undermeny/rullgardin eller dialogen:

Tryck på högerpil eller ok-knappen.

Ändra inställningen i en kombinationsruta:

Tryck på pil vänster eller höger.

Ändra numerisk värde i en redigeringsruta:

Knappa in värdet på sifferknapparna.

Spara inställning:

Tryck på ok-knappen.

Avsluta utan att spara:

Tryck på knappen avbryt.

3. Navigera i mappar och fillistor

Flytta mellan listobjekt: Tryck på pil upp eller ner.

Flytta upp 5 objekt i en lista: Tryck på nummer 1.

Flytta ner 5 objekt i en lista: Tryck på nummer 4.

Flytta upp 10 objekt i en lista: Tryck på nummer 2.

Flytta ner 10 objekt i en lista: Tryck på nummer 5.

Flytta till toppen av listan: Tryck på nummer 3.

Flytta till botten av listan: Tryck på nummer 6.

Flytta till specifik fil: Tryck på nummer 8.

Öppna undermapp: Tryck på pil höger.

Gå tillbaka till överordnad mapp: Tryck på pil vänster.

Spela upp valt objekt:

Tryck på spela/pausa eller ok-knappen.

Stoppa uppspelning och återgå till fillistan:

Tryck på knappen avbryt.

Välj det aktuella objektet: Tryck på nummer 9.

Markera alla objekt i listan: Tryck på nummer 7.

Ta bort markerade objekt:

Håll ner nummer 3 i 2 sekunder.

Meddela storlek på fil/mapp: Tryck på nummer 0.

4. Uppspelning

Välj förflyttningsenhet: Tryck på pil upp eller ner.

Flytta till nästa eller föregående enhet:
Tryck på pil vänster eller höger.

Flytta till en specifik del i filen: Tryck på nummer 8.

Växla märkestyp: Tryck på nummer 9.

Sätt märke vid nuvarande position: Tryck på nummer 1.

Flytta till ett specifikt märke: Tryck på nummer 2.

Ta bort märke: Tryck på nummer 3.

Radera alla märken i filen:
Håll ner nummer 3 i 2 sekunder.

Minska uppspelningshastigheten: Tryck på nummer 4.

Öka uppspelningshastigheten: Tryck på nummer 6.

Återgå till normal hastighet: Tryck på nummer 5.

Spara till spellista: Håll ner nummer 7 i 2 sekunder.

Ändra equalizerinställningar: Tryck på nummer 7.

Aktivera/avaktivera repeat:
Håll ner nummer 8 i 2 sekunder.

Aktivera / avaktivera shuffle: Håll ner nummer 9 i 2 sekunder.

Meddela filinformation: Tryck på nummer 0.

Visa tagginformation: Håll ner nummer 0 i 2 sekunder.

Stoppa uppspelning: Tryck på knappen avbryt.

5. Daisyuppspelning

Välj förflyttningsenhet: Tryck på pil upp och ner.

Flytta till nästa eller föregående enhet:
Tryck på pil vänster och höger.

Flytta till specifik sida: Tryck på nummer 7.

Flytta till specifik rubrik: Tryck på nummer 8.

Växla märkestyp: Tryck på nummer 9.

Sätt märke: Tryck på nummer 1.

Flytta till specifikt märke: Tryck på nummer 2.

Radera ett specifikt märke: Tryck på nummer 3.

Ta bort alla märken i boken: Håll ner nummer 3 i 2 sekunder.

Minska uppspelningshastigheten: Tryck på nummer 4.

Öka uppspelningshastigheten: Tryck på nummer 6.

Återgå till normal hastighet: Tryck på nummer 5.

Meddela bokinformation: Tryck på nummer 0.

Meddela detaljerad information om boken: Håll ner nummer 0 i 2 sekunder.

Stoppa uppspelning: Tryck på knappen avbryt.

6. Textläsare

Välj förflyttningsenhet: Tryck på pil upp eller ner.

Flytta till nästa eller föregående enhet:
Tryck på pil vänster eller höger.

Flytta till en specifik sida: Tryck på nummer 7.

Flytta till specifik position i filen: Tryck på nummer 8.

Växla märkestyp: Tryck på nummer 9.

Sätt märke: Tryck på nummer 1.

Flytta till ett specifikt märke: Tryck på nummer 2.

Ta bort specifikt märke: Tryck på nummer 3.

Ta bort alla märken i filen: Håll ner nummer 3 i 2 sekunder.

Minska uppspelningshastigheten: Tryck på nummer 4.

Öka uppspelningshastigheten: Tryck på nummer 6.

Återgå till normal hastighet: Tryck på nummer 5.

Meddela dokumentinformation: Tryck på nummer 0.

Stoppa uppspelning: Tryck på knappen avbryt.

7. Radio

Öka frekvensen med 0,1 MHz: Tryck på pil höger.

Minska frekvensen med 0,1 MHz: Tryck på pil vänster.

Justera frekvensens sökkänslighet: Tryck på nummer 7.

Sök efter föregående frekvens:
Håll ner pil vänster i 2 sekunder.

Sök efter nästa frekvens: Håll ner pil höger i 2 sekunder.

Meddela aktuell frekvens: Tryck på nummer 0.

Växla mellan förvalda kanaler: Tryck på pil upp eller ner.

Flytta direkt till förinställd kanal: Tryck nummer 1 till 6.

Ställ in en förinställd kanal:
Håll ner ett nummer mellan 1 till 6 i 2 sekunder.

Ta bort en förinställd kanal: Tryck på nummer 8.

Växla ljudet mellan interna högtalare och hörlurar:
Tryck på nummer 9.

